

Калоприемники однокомпонентные
дренируемые



Coloplast A/S
Høtveddam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Инструкция по использованию

23317240 Version 1

Логотип Coloplast является зарегистрированной торговой маркой компании Колопласт А/С. Все права защищены.©

Права на застежку Velcro® принадлежат компании Velcro Industries B.V. 2016-12-12

Импортер: ООО «Колопласт»

Ленинградский пр-т,

д. 72 корп. 2

Москва, Россия, 125315

Тел.: +7 495 937 53 90


info@coloplast.ru

Претензии потребителя принимаются импортером.


РУ №РЗН 2016/4814 от 06.10.2016



Подготовка

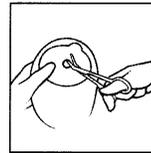


Определите размер и форму стомы с помощью приложенного измерителя стомы. Вырежьте в пластине отверстие, соответствующее размеру и форме стомы, используя ножницы с изогнутыми концами и шаблон для вырезания отверстий на защитном покрытии пластин. Во избежание протекания и раздражения кожи необходимо, чтобы вырезанное отверстие соответствовало форме и размеру стомы.

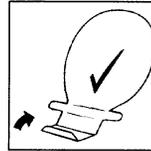


Встроенная застежка Hide-away

Положите калоприемник на стол пластиной вниз. Закройте дренажное отверстие калоприемника завернув губчатую полоску 3 раза до появления велюровой полоски.

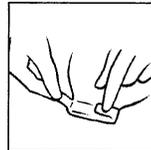

Герметично закройте дренажное отверстие, плотно прижав застежки-липучки к велюровой полоске.

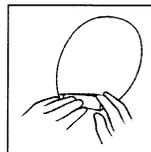

Можно еще раз завернуть застежку и спрятать ее под нетканое покрытие.

Показания

Для сбора кишечного отделяемого из стомы, а также для защиты кожи перистомальной области у пациентов, перенесших операцию с формированием илеостомы или колостомы на передней брюшной стенке.

Условия хранения

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.

Информация

Компания Колопласт не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования данного изделия с нарушением способа, рекомендованного компанией.

Меры предосторожности

Перед применением калоприемников со встроенными конвексными пластинами необходимо проконсультироваться со специалистом по уходу за стомой.


Предупреждения

Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и (или) стерилизация могут ухудшить характеристики изделия, что создает дополнительный риск нанесения телесного повреждения или инфицирования пациента.

Гибкий самоклеящийся зажим / с пластиковым зажимом

Достаньте гибкий самоклеящийся зажим и, предварительно сняв защитную бумагу, приклейте его на дренажный конец мешка. Если не удалось правильно установить зажим с первого раза, отклейте его и закрепите снова. Накрутите дренажный конец мешка 4-5 раз на зажим, поворачивая его по направлению к передней брюшной стенке, а затем загните края зажима в обратном направлении. Если используется пластиковый зажим, необходимо один раз завернуть дренажный конец мешка перед тем, как закрыть зажим.


Применение

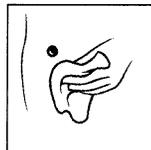

Тщательно очистите стому и кожу вокруг стомы. Клеевая пластина наклеивается только на чистую и сухую кожу.



Снимите с пластины защитную пленку.

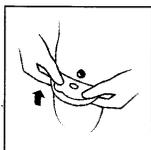


Наложите пластину вокруг стомы и прижмите ее к коже, чтобы она быстро и надежно приклеилась вокруг стомы.




Чтобы быстро и надежно приклеить пластину калоприемника к коже вокруг стомы, плотно прижмите ее к коже.


Как опорожнить калоприемник

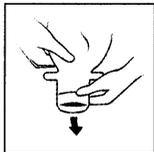


Откройте дренажное отверстие и опорожните калоприемник в унитаз, придерживая его руками.

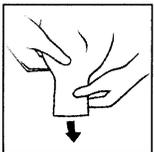


Тщательно протрите дренажный конец калоприемника салфеткой или туалетной бумагой. По окончании дренирования снова закройте дренажное отверстие.

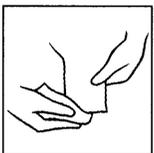

Удаление

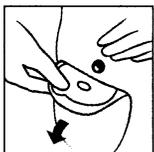

Удалите калоприемник, потягивая за ушко пластины и медленно отклеивая ее сверху вниз. При этом другой рукой слегка натягивайте кожу живота. Изделие предназначено только для однократного применения. Использованное изделие следует выбросить с бытовым мусором. Не смывать изделие в унитаз.

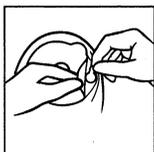

Для приостановки оттока газов из мешка закройте отверстие фильтра защитной наклейкой.