

ВИТАФОН-Т

АППАРАТ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И ТАЙМЕРОМ

МЕТОДИКИ ФОНИРОВАНИЯ



Рис. 1. Области Z1, Z2.

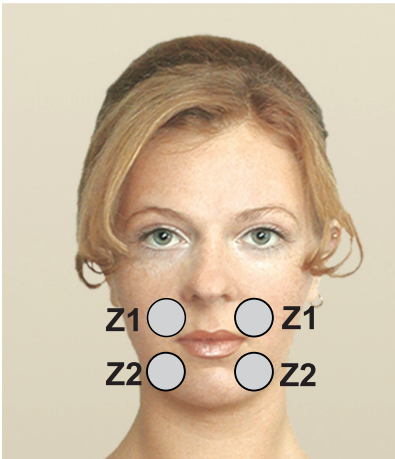


Рис. 2. Область G.


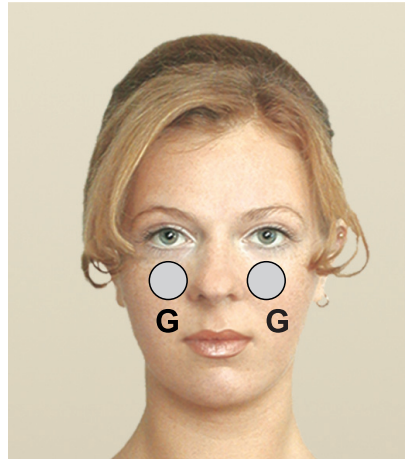


Рис. 3. Области воздействия M12, M13, M4, ПЛУ.

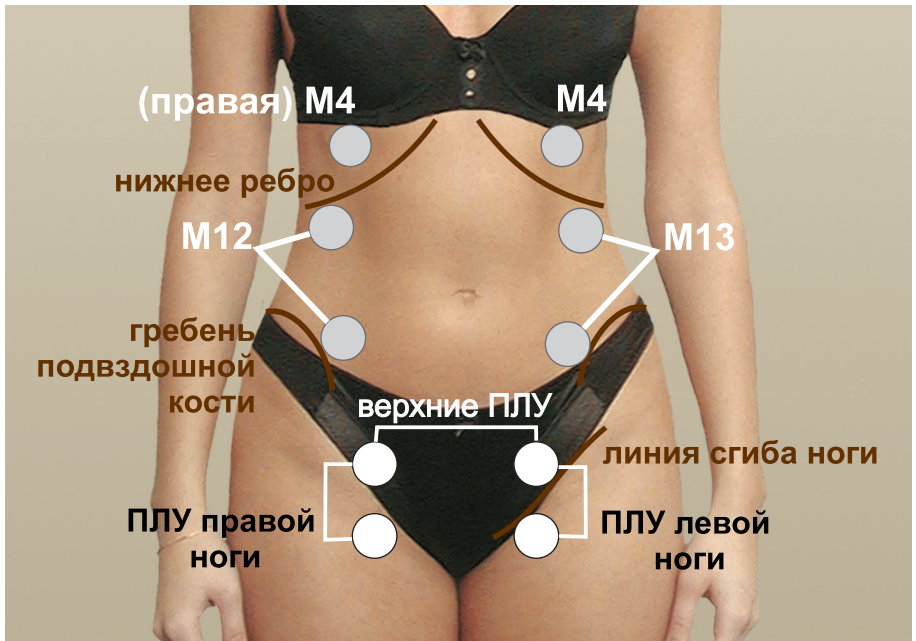

Содержание

| | |
|--|-----------|
| ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОНИРОВАНИЯ..... | 1 |
| Области воздействия микровибрацией..... | 1 |
| Противопоказания для фонирувания | 2 |
| Особенности фонирувания области почек (К) | 3 |
| Особенности фонирувания других областей | 3 |
| Дополнительные области фонирувания..... | 4 |
| Целостность шнуров виброфонов..... | 4 |
| Правила установки виброфонов | 4 |
| Ощущения от фонирувания..... | 5 |
| Мощность воздействия | 6 |
| Время воздействия | 6 |
| Частота процедур | 6 |
| Продолжительность курса..... | 7 |
| Сочетание с лекарственной терапией | 8 |
| Фонирувание при сочетанных патологиях | 8 |
| Фонирувание при тяжелом состоянии больного | 9 |
| ОБЩАЯ РЕСУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА (ОРПО)..... | 10 |
| ОРПО, снятие общей усталости | 10 |
| Снятие усталости мышц..... | 11 |
| Увеличение работоспособности..... | 11 |
| Профилактика простудных заболеваний | 12 |
| В косметических целях..... | 12 |
| АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ГИПЕРТОНИЯ)..... | 13 |
| Методика № 1 | 13 |
| Методика № 2..... | 15 |
| ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ..... | 16 |
| Методика фонирувания позвоночника | 16 |
| Остеохондроз, радикулит | 17 |
| Грыжа межпозвонкового диска..... | 19 |
| Сколиоз..... | 20 |
| Боль в спине..... | 20 |
| Методика фонирувания суставов | 21 |

| | |
|---|-----------|
| Артроз, артрит, повреждения мениска | 22 |
| Пяточная шпора..... | 24 |
| Подагра | 25 |
| МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 26 |
| Аденома предстательной железы | 26 |
| Простатит..... | 27 |
| Улучшение потенции, преждевременная эякуляция | 29 |
| ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 31 |
| Болезненные менструации | 31 |
| Нарушение менструального цикла..... | 32 |
| Подготовка к беременности..... | 32 |
| Улучшение лактации..... | 32 |
| Лактостаз | 33 |
| Серозный мастит | 33 |
| УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ..... | 34 |
| Неудержание мочи..... | 34 |
| Пиелонефрит (хронический)..... | 35 |
| Почечная недостаточность | 36 |
| Цистит и нарушение мочеиспускания..... | 37 |
| Энурез..... | 38 |
| ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА..... | 39 |
| Хронический гастрит | 39 |
| Дуоденит | 39 |
| Запор | 40 |
| Геморрой | 41 |
| Колики | 42 |
| Энкопрез | 42 |
| СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | 43 |
| Аритмия | 43 |
| Стенокардия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) | 43 |
| Последствия инсульта..... | 44 |
| Трофические язвы на ногах..... | 45 |
| Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)..... | 46 |
| Дисциркуляторная энцефалопатия (Хроническая ишемия мозга)..... | 46 |
| ПРОСТУДА, ОРЗ, АНГИНА, БРОНХИТ | 47 |

| | |
|---|-----------|
| Общие положения..... | 47 |
| Бронхит..... | 48 |
| Гайморит..... | 49 |
| Ринит (насморк)..... | 50 |
| Тонзиллит (ангина) | 50 |
| ТРАВМЫ..... | 52 |
| Переломы конечностей, ключицы, ребер..... | 52 |
| Компрессионный перелом позвоночника | 53 |
| Рана, послеоперационный шов | 54 |
| Ожог | 54 |
| Обморожение..... | 55 |
| Ушиб, гематома | 56 |
| Растяжение, вывих | 56 |
| ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ | 57 |
| Глаукома | 57 |
| СТОМАТОЛОГИЯ | 59 |
| Профилактика здоровья зубов | 59 |
| Ортодонтия (брекет-системы, элайнеры)..... | 60 |
| Пародонтология (пародонтит, гингивит)..... | 60 |
| Зубная боль | 61 |
| ЗАБОЛЕВАНИЯ УШЕЙ | 62 |
| Отит. Воспаление уха..... | 62 |
| Нейросенсорная тугоухость | 63 |
| АЛЛЕРГИЯ | 64 |
| ИШИАС | 65 |
| ЛИМФОСТАЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 66 |
| ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА..... | 67 |
| ПРОЛЕЖНИ..... | 68 |
| САХАРНЫЙ ДИАБЕТ..... | 69 |
| ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ..... | 71 |

ОБЛАСТИ В СХЕМАХ ФОНИРОВАНИЯ

Ниже приведены области воздействия, которые встречаются во многих схемах фонирования.

| Область фонирования | | Расположение рисунка | |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| К | область почек | центральный вкладыш | рис.9 |
| М | область печени и желчного пузыря | | рис.8 |
| М5 | область печени | | рис.8 |
| D1 | шейный отдел позвоночника | | рис.6 |
| D2 | шейный отдел позвоночника | | рис.6 |
| E1 | грудной отдел позвоночника | | рис.6 |
| E11 | грудной отдел позвоночника | | рис.6 |
| E2 | грудной отдел позвоночника | | рис.6 |
| E21 | грудной отдел позвоночника | | рис.6 |
| E3 | поясничный отдел позвоночника | | рис.9 |
| E31 | поясничный отдел позвоночника | | рис.9 |
| E4 | крестец | | рис.9 |
| E40 | весь позвоночник | | обложка |

Указания на рисунки или их подробное описание в отношении других областей даны непосредственно в тексте методик.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОНИРОВАНИЯ

Фонирование – комфортная процедура, выполняемая пользователем самостоятельно с помощью виброакустических аппаратов. Общая цель фонирования – обеспечить организм энергией микровибрации в областях, где имеется недостаток собственной микровибрации. Фонирование осуществляется по методикам, которые включают в себя перечень областей воздействия, продолжительность и мощность воздействия на область, периодичность проведения процедур.

ВНИМАНИЕ! Для выбора методики фонирования необходимо правильно установить диагноз, а также выявить области, входящие в перечень противопоказаний.

Области воздействия микровибрацией

Области воздействия изображены на рисунках на обложке, на центральном вкладыше. Описание некоторых областей воздействия (в том числе с рисунками) дано непосредственно также в тексте.

Практически все методики фонирования для различных заболеваний и проблемных состояний помимо области патологии/боли включают в себя **области печени (М), почек (К) и позвоночника** (его сегментов). Такой подход к составлению методик был выработан многолетней практикой. **Восстановление области заболевания происходит за счет ресурсов всего организма, которые, в частности, зависят от состояния печени, почек и позвоночника.**

Фонирование области печени (М) способствует улучшению ее функции, препятствуя накоплению в крови токсичных и других веществ, подлежащих разложению в печени.

Фонирование области почек (К) улучшает их функцию по поддержанию кислотно-щелочного баланса крови и ее очистке от продуктов активности мышечных клеток. Через 40 минут после воздействия микровибрации на **область почек (К)** увеличиваются собственные микровибрации и повышается работоспособность.

Фонирование области позвоночника снимает отек, ускоряет восстановление энергетического потенциала мышечных и нервных клеток, способствует костномозговому кроветворению и обогащению крови зрелыми стволовыми клетками (патент России № 2166924).

Фонирование области патологии существенно увеличивает скорость удаления шлаков, уменьшает отек, усиливает капиллярный кровоток и иммунные реакции.

С учетом вышеизложенного, при проведении процедур фонирувания следует:

1) соблюдать последовательность воздействия на области, указанные в методиках фонирувания, которые, как правило, начинаются с фонирувания **области почек (К) и печени (М)**. В первую очередь, необходимо увеличить общие ресурсы организма, и уже во вторую очередь обеспечить микровибрацией область патологии;

2) не исключать из схемы фонирувания области воздействия (при отсутствии противопоказаний или особых рекомендаций). Если есть ограничения по времени, рекомендуется пропорционально уменьшить время воздействия для каждой области, не сокращая перечень областей воздействия за одну процедуру.

Противопоказания для фонирувания

Общие противопоказания к фонируванию

(виброакустическому воздействию):

- период острого развития инфекционного заболевания
- высокая (выше 38,5°C) температура
- лейкоз и нарушения свертывающих систем крови;
- развитый церебральный атеросклероз (сосудов головного мозга);
- заболевания в стадии декомпенсации (например, декомпенсированный цирроз печени, декомпенсированная сердечная недостаточность);
- активный туберкулез легких;
- эпилепсия с частыми припадками;
- тяжелый психоз;
- болезнь Крона.

Частные противопоказания к фонируванию (не допускается в конкретной области, но возможно фонирувание на расстоянии более 10 см от нее):

- в области злокачественных новообразований;
- в области действия имплантированных стимуляторов;
- при беременности ближе 10 см от плода;
- в области тромба;
- в области выраженного атеросклероза;
- в области гемангиомы позвонка;
- в области шеи при заболеваниях щитовидной железы;

- в области кровотечения или подозрения на него, или при высоком риске его возникновения (например, при эндометриозе и миоме матки);
- в области аневризмы брюшной аорты;
- в области органов (мочевого пузыря, желчного пузыря, почек), где находятся камни, не способные к самостоятельному отхождению.

Особенности фонирования области почек (К)

Фонирование почек оказывает благоприятное влияние на **отхождение камней малого размера**, которые способны самостоятельно отойти через соответствующие протоки (до 4 мм, но точные размеры зависят от индивидуальных особенностей человека). Более того, чем раньше камень отойдет, тем лучше для функционирования органа.

Кисты в почках не являются противопоказанием. По имеющимся длительным (год и более) наблюдениям за кистами почек под влиянием фонирования они имеют тенденцию к уменьшению или не меняются. Наблюдаемые на УЗИ колебания размеров кист обусловлены погрешностью измерения.

При опущении почек во всех случаях, когда в схемах указаны точки К (рис. 9), виброфоны устанавливают на область опущенного расположения почек.

При наличии **только одной почки** оба виброфона устанавливают в области этой почки — первый на точку К, второй — в области мочеточника (под первым виброфоном). При наличии любого заболевания единственной почки фонирование этой почки можно проводить только по назначению врача-специалиста.

Если в процессе фонирования почек **повышается давление** или появляется кровь в моче, процедуры прекращают, так как данные симптомы могут быть признаками наличия острого воспалительного процесса в почках, который требует наблюдения врача специалиста.

Особенности фонирования других областей

- 1) При наличии камней в желчном пузыре или если он удален, то во всех случаях, когда в схемах указаны **точки М**, их заменяют на **М5**. Это связано с тем, что фонирование желчного пузыря повышает его тонус, что может вызвать болезненные ощущения при наличии в нем камней;
- 2) При аритмии сердца и после инфаркта миокарда необходимо ограничить воздействие на грудной отдел позвоночника – не более 5 минут на области E11, E2, E21. Фонирование начинают с

минимального времени (1 минута) и увеличивают его очень постепенно по 1 минуте каждые 3-4 дня.

3) Если ранее было зафиксировано более одного случая инсульта, то фонирование рекомендуется начать с выполнения методики «Последствия инсульта».

Дополнительные области фонирования

Фонирование можно проводить на дополнительные области, не указанные в схемах для конкретного заболевания. Так в период заболевания могут проявиться области, вызывающие сильный дискомфорт или очень болезненные ощущения при пальпации. Фонирование таких областей допускается в дополнение к основной схеме для конкретного заболевания при отсутствии острого течения заболевания (в частности, температуры выше 38,5).

Время воздействия – не более 5 минут. Режим воздействия: если болезненная область на конечностях – **режим 2**, если на других частях тела – то **режим 1**.

Важно! Обращайте внимание на то, что воздействие на болезненную область возможно только в случае, если данная область не входит в перечень противопоказаний.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целостность шнуров виброфонов

Шнуры виброфонов могут потерять эластичность при длительном и частом контакте с кожей (в частности, из-за потоотделения). В результате может произойти обрыв внутренних токопроводящих жил. В связи с этим рекомендуется виброфоны ставить на тело поверх тонкого белья.

Правила установки виброфонов

Преобразователь, с помощью которого передаются микровибрации при контакте с телом, называется виброфоном. Виброфоны прикладывают мембранами к поверхности тела через марлевую, бумажную или хлопчатобумажную салфетку. Виброфоны крепят с помощью эластичного бинта, специальных фиксирующих манжет для аппаратов серии «Витафон», удерживают руками или прижимают собственным весом (например, лежа на спине). Поверхности мембран должны плотно прилегать к телу. Критерием правильности наложения служит максимальное ощущение микровибрации на низкой частоте (когда звук наиболее низкий). Не следует с чрезмерным усилием прижимать мембраны к

телу. Это приведет к прекращению микровибрации и отсутствию восстановительного эффекта.

Виброфоны, как правило, устанавливаются по два на область. При этом виброфоны могут располагаться на любом расстоянии друг от друга (если их расположение не определено методикой), как в одной плоскости, так и под некоторым углом друг к другу (например, при фонировании суставов). Глубина воздействия от плоскости мембраны виброфона вглубь тканей составляет примерно 10 см.

ВНИМАНИЕ! При установке виброфонов на область погрешность в 1-2 см не является существенной (допустима).

При сильном повреждении тканей (ожог, гангрена, нарыв, пролежни и т.п.) при фонировании соответствующей области виброфоны устанавливают на заведомо здоровую часть, прилегающую к поврежденной ткани. Это необходимо для того, чтобы избежать излишнего поступления конечных продуктов обмена веществ в кровь под воздействием микровибрации из пораженной области. По мере восстановления, область фонирования приближают к краю области патологии.

Если нет специальных указаний, фонирование проводят в положении лежа на спине или сидя.

Ощущения от фонирования

Во время фонирования в области воздействия наблюдается приятное чувство тепла и легкой вибрации.

При попадании в зону воздействия нервного центра иногда **могут появляться болезненные ощущения**. Их появление является положительным симптомом, который свидетельствует о восстановлении адекватной реакции организма на внутренние нарушения. При возникновении таких болезненных ощущений процедуры не прекращают, при этом можно уменьшить время воздействия на область болезненных ощущений и/или на позвоночник в течение одной процедуры (не сокращая количество процедур в сутки).

Фонирование при хронических заболеваниях, как правило, протекает через кратковременное усиление болезненных проявлений (5-10 дней), которые постепенно исчезают. При наступлении обострения процедуры не прекращают.

При запущенных формах заболеваний болезненные ощущения могут исчезнуть только к концу первого курса или даже при повторных курсах фонирования.

Мощность воздействия

Мощность (амплитуда) микровибрации одновременно с частотой колебаний определяется выбранным режимом. Режимы 2 и 4 рассматриваются как более мощные по сравнению с режимами 1 и 3. Когда процедуры проводятся **детям до 10 лет**, то во всех случаях, когда в схеме, указан режим 2, **применяется режим 1**.

Время воздействия

Воздействие на каждую область оказывается в течение времени, указанного в схеме для соответствующего заболевания. Схемы фонирования построены таким образом, чтобы время фонирования увеличивалось от начального до достаточного постепенно по дням и далее не менялось. Исходя из собственных ощущений, темп набора дозы может быть уменьшен для большей комфортности восстановительного процесса.

Не рекомендуется ускорять темп увеличения времени по сравнению с методикой, поскольку это может вызвать значительную нагрузку на органы, очищающие кровь от продуктов распада (шлаков). Ускорять темп увеличения времени фонирования по сравнению с методикой можно только при отсутствии серьезных и хронических заболеваний.

Время, указанное в последней строке схем, является достаточным при данном заболевании. Однако **достаточное время фонирования может быть увеличено** или уменьшено, **исходя из собственных ощущений**. При этом время воздействия необходимо увеличивать постепенно (например, по одной минуте в день) и не более чем в два раза, по сравнению с достаточным для данной области. Время воздействия на лимфатические узлы (область ПЛУ на рис.3 и ПКЛУ на рис.8) не рекомендуется увеличивать.

Частота процедур

Методики фонирования включают в себя рекомендуемое количество процедур. В большинстве случаев рекомендуется проводить одну и более процедур в сутки. При этом:

1) Чем больше процедур проводится в сутки и в неделю, тем быстрее достигается результат. При проведении нескольких процедур в течение суток, каждую следующую процедуру рекомендуется проводить не ранее, чем через 4 часа.

2) Эффект от фонирования увеличивается в большей степени от частоты процедур, в меньшей степени – от увеличения времени фонирования каждой области. Если нет времени проводить процедуры полностью (с учетом достаточного времени, указанного

в схемах для каждой области) более одного раза в сутки, рекомендуется пропорционально сократить время воздействия для каждой области в 2 и более раз за одну процедуру, при этом провести несколько процедур в сутки.

3) При увеличении нагрузок (стресс, охлаждение, физическое утомление и т.д.) рекомендуется проводить дополнительные процедуры.

Продолжительность курса

Фонирование выполняется курсами. Основной курс фонирования предполагает большое количество процедур, как правило, несколько раз в сутки 5-7 дней в неделю (указано в методиках). **Если в методике не указана продолжительность основного курса**, то частое фонирование продолжают до полного выздоровления или достижения желаемого результата. В зависимости от характера, тяжести заболевания и активности фонирования результат достигается от нескольких дней до нескольких месяцев.

Если полное выздоровление не наступает или невозможно (в зависимости от заболевания), то через 3 месяца в основном курсе делают перерыв не менее чем в 5 дней (но не более 1 месяца), если иной срок не указан в методике фонирования.

Если в течение одного месяца не ощущается никаких изменений в организме, необходимо проверить аппарат, уточнить диагноз, первопричину заболевания и схему фонирования.

При достижении желаемого результата от основного курса переходят к **поддерживающим процедурам**, то есть уменьшают количество процедур в сутки и в неделю по сравнению с основным курсом. Поддерживающие процедуры проводятся на достигнутом достаточном времени для областей воздействия (время, указанное в последней строке схем). Рекомендованное количество поддерживающих процедур для профилактики конкретного заболевания указано в методиках, а если не указано – пользователь сам выбирает их количество с учетом жизненных обстоятельств, но желательно не менее 1 процедуры в неделю. При увеличении ресурсных трат (стресс, охлаждение, физическое утомление и т.д.) рекомендуется пропорционально увеличить количество поддерживающих процедур в неделю. Поддерживающие процедуры могут проводиться как по схеме фонирования для конкретного заболевания, так и по схеме ОРПО (стр. 10).

Помимо поддерживающих процедур для улучшения результата (в частности, при хронических заболеваниях) **основные курсы**

фонирования повторяют. При этом, если перерыв в фонировании составит менее 1 месяца (с учетом поддерживающих процедур), то процедуры проводятся сразу на достаточном времени (время, указанное в последней строке схем).

Рекомендуется регулярное фонирование (по схеме ОРПО, стр.10) в целях профилактики независимо от необходимости лечения конкретного заболевания. Фонирование способствует более полному восполнению ресурсов организма, которые расходуются каждый день.

Сочетание с лекарственной терапией

Фонирование хорошо сочетается с лекарственной терапией, рекомендованной врачом. Фонирование повышает эффективность лекарственной терапии, поэтому дозировку лекарственных препаратов иногда следует уменьшать.

Если в процессе лечения используются лекарственные средства, предписанные врачом, то фонирование рекомендуется проводить в момент максимума концентрации лекарства в крови:

- через 40-60 минут после приема таблеток или микстур;
- через 5-15 минут после инъекций;
- через 2-4 часа после наложения мазей.

Особенности применения гипотензивных препаратов в сочетании с фонированием почек изложены в разделе «Артериальная гипертензия (гипертония)».

Особенности применения некоторых лекарственных средств в сочетании с фонированием при лечении отдельных заболеваний изложены в соответствующих разделах.

Фонирование при сочетанных патологиях

Проводить фонирование сразу нескольких патологий можно только при общем удовлетворительном состоянии. В этом случае общая схема фонирования составляется на основе схем для беспокоящих заболеваний с учетом следующих правил:

- 1) Не рекомендуется фонировать одновременно более 2 патологий;
- 2) Составляется перечень всех областей воздействия, указанных в схемах для беспокоящих заболеваний;
- 3) Для каждой области (кроме области почек (К)) выбирается наибольшее время, указанное в схемах. Например, если в схеме для одного заболевания время воздействия для области Е3 указано 5 минут, а в схеме для другого – 7 минут, выбирается время – 7 минут.

4) Время воздействия на область почек (К) должно быть не менее суммы времени фонирования областей позвоночника (например, D1, D2) и области основной патологии (например, суставов при артрите). Однако если сумма времени фонирования этих областей составит более 40 минут (например, суммарное время всех областей позвоночника и суставов составит 64 минуты), тогда рекомендуется проводить две процедуры на область почек: основную, когда фонироваться также другие области, - длительностью 40 минут, а также дополнительную не менее чем через 2 часа – в течение времени, превышающем 40 минут (в приведенном примере - 24 минуты). **Достаточное время воздействия на почки (К) за одну процедуру составляет 40 минут.**

5) Если фонирование какой-либо области ранее уже проводилось, при этом перерыв составил не более 1 месяца, то при переходе к фонированию по другой схеме для этой же области можно начинать не с первого дня схемы, а исходя из достигнутого достаточного для этой области времени.

Фонирование при тяжелом состоянии больного

При тяжелом состоянии больного (в частности, после инсульта, инфаркта) и множественности заболеваний рекомендуется увеличить постепенность набора дозы (по сравнению со схемами) и вводить фонирование областей по одной. Введение областей воздействия осуществляется следующим образом.

Сначала воздействие оказывают только на область К (почки). Начинают с минимального времени, и, прибавляя по 1-2 минуте в день, доводят его до максимального времени, указанного в схеме для соответствующего заболевания.

Затем, сохраняя максимальное время фонирования области почек, добавляют область печени, обозначаемую «М». Также начинают с минимального времени и, прибавляя по 1 минуте в день, доводят его согласно выбранной схемы до максимального времени.

Сохраняя максимальное время фонирования области почек и печени, добавляют следующую область из выбранной схемы. Также начинают с минимального времени фонирования и, прибавляя по 1 минуте в день или через день, доводят его согласно выбранной схемы до максимального времени.

Аналогично вводятся остальные, указанные в схеме области.

ОБЩАЯ РЕСУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА (ОРПО)

ОРПО, снятие общей усталости

Цель фонирования. Общая ресурсная поддержка организма (ОРПО) - компенсация дефицита микровибрации в области почек (К), печени (М) и позвоночника в целях общего укрепления организма и профилактики заболеваний. В области фонирования происходит очистка тканей от конечных продуктов обмена веществ и насыщение клеток энергоресурсами. Фонирование данных областей рекомендуется даже при отсутствии патологий. Выполнение программы ОРПО повышает общий тонус организма, увеличивает работоспособность. При выполнении процедуры после рабочего дня снимает усталость.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 1**. Эффект пропорционален количеству процедур в сутки и в неделю. Для сокращения времени фонирования в течение одной процедуры, области E11, E2, E3 и E4 можно заменить на область E40 (рис. 12). Темп увеличения времени фонирования такой же, как для E11.

Схема 1. Фонирование для ОРПО.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | |
|-------|--|---------|-----|----|----|---------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | | Режим 2 |
| | К | М | E11 | E2 | E3 | E4 |
| 1-2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3-6 | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7-10 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11-14 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| далее | 36 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 |

Снятие усталости мышц

Цель фонирувания. Фонирувание конкретных групп мышц применяется при их утомлении после значительных нагрузок, либо для ресурсной накачки с целью расширения физических возможностей, например в спорте. Фонирувание позволяет избежать болезненных осложнений, ускоряет восстановление мышц (в 1,5-2 раза) и способствует очистке крови от продуктов мышечной активности. Наиболее актуально восстановление мышц спины, голени и ступни, поскольку они участвуют в нейромышечной системе амортизации позвоночника и суставов (подробнее в разделе «Заболевания позвоночника и суставов»).

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 2**. Если ранее фонирувание проводилось (при отсутствии перерыва более 1 месяца), стартовый день в схеме выбирается, исходя из достигнутого времени для **области почек (К)**. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки в период повышенной физической нагрузки**.

При фонирувании кистей виброфоны зажимают в кулаках, мембранами к ладоням. На другие области конечностей виброфоны фиксируют эластичным бинтом или с помощью манжет.

Схема 2. Фонирувание для снятия мышечной усталости.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | |
|-------|--|---------------------------------|
| | Режим 2 | |
| | К | Наиболее утомленные группы мышц |
| 1-2 | 15 | По 3 мин. на группу |
| 3-4 | 21 | По 7 мин. на группу |
| далее | 30 | По 10 мин. на группу |

Увеличение работоспособности

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 3**. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки 2-7 раз в неделю в период повышенных** физических, умственных и психических **нагрузок**. Суммарное количество процедур в неделю зависит от интенсивности и продолжительности нагрузок. Чем больше нагрузки, тем больше процедур, но польза есть даже от одной процедуры.

Схема 3. Фоноирование для увеличения работоспособности.

| День | Режим, области и время фоноирования (мин) | |
|-------|---|----------|
| | Режим 2 | Режим 1 |
| | К | М |
| 1-2 | 5 | 5 |
| 3-6 | 8 | 8 |
| 7-10 | 10 | 10 |
| далее | 15 | 15 |

Профилактика простудных заболеваний

Методика. Фоноирование проводят по **схеме 4**. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки 2-7 раз в неделю**. Начинать курс рекомендуется, когда ожидается резкое похолодание.

Продолжительность курса - 2-3 недели. Для профилактики простудных заболеваний проводят 2-4 курса в год (с сентября по май). Профилактика оправдывается лучшим самочувствием, настроением, существенно большей работоспособностью.

Схема 4. Фоноирование для профилактики простудных заболеваний.

| День | Режим, области и время фоноирования (мин) | |
|-------|---|----------|
| | Режим 2 | Режим 1 |
| | К | М |
| 1-2 | 5 | 5 |
| 3-6 | 8 | 8 |
| 7-10 | 12 | 12 |
| далее | 15 | 15 |

В косметических целях

Цель фоноирования. Повышение эффективности косметических средств. После косметических операций – воздействие на области швов уменьшает рубцы, снижает риск осложнений.

Методика. На область, на которую было нанесено косметическое средство, устанавливают виброфоны через бумажную, марлевую или тканевую салфетку. Воздействие оказывают в режиме 1 в течение 3-5 минут.

ВНИМАНИЕ! Косметическое средство должно быть индивидуально подобрано и не вызывать аллергии.

После косметических операций фоноирование проводят по методике, изложенной в разделе «Раны. Послеоперационный шов».

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ГИПЕРТОНИЯ)

Цель фонирувания. В целом ряде медицинских исследований показано, что фонирувание **области почек (К)** существенно улучшает их функцию и способствует ускорению нормализации артериального давления (АД). Фонирувание позволяет улучшить самочувствие и повысить работоспособность, и при этом снизить дозу принимаемых гипотензивных препаратов, в том числе отказаться от них. Давление же снижается иногда после нескольких сеансов, иногда через несколько месяцев в зависимости от стадии гипертонической болезни и длительности искусственного снижения АД. После месяца процедур отмечается снижение уровня холестерина в крови. Эффективность метода пропорциональна количеству выполненных процедур.

Методика. В большинстве случаев снижения АД добиваются с помощью **методики №1**. Если гипертензия вызвана сосудистой недостаточностью спинного или головного мозга, то более эффективна **методика №2**.

Продолжительность курса. Фонирувание продолжают до достижения оптимального уровня АД. По достижении оптимального АД переходят к поддерживающим процедурам фонирувания: количество процедур можно сократить до 1-2 раз в сутки, но при увеличении физических нагрузок, переохлаждении, длительном стрессе проводят на одну процедуру больше (2-3 раза в сутки). При необходимости повторные курсы проводят 2-3 раза в год.

Методика № 1

Методика № 1 применяется при артериальной гипертензии (гипертонии) 1-3 степени в случае, **если верхнее (систолическое) АД без приема лекарств**, понижающих давление, **утром обычно меньше, чем вечером**. Если вечером повышается только систолическое давление, фонирувание проводят по **схеме 5**. Если вечером повышается и систолическое, и диастолическое АД, фонирувание проводят по **схеме 6**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Лечение гипертонии 1 степени (уровень АД в пределах 125/90 - 159/99 мм. рт. ст.) проводят без медикаментозной терапии. Лечение гипертонии 2 и 3 степени (уровень АД более 160/100 мм. рт. ст.) проводят с применением гипотензивных препаратов с постепенным уменьшением дозы. Первые 2 недели фонирувание проводят с применением полной суточной дозы гипотензивных препаратов. Далее – при гипертонии 2 степени дозу лекарств уменьшают на 1/2 суточной дозы каждые 2-3 недели, а при

гипертонии 3 степени на 1/4 суточной дозы каждые 2-3 недели. Под суточной дозой понимается доза лекарственного препарата, рекомендованного врачом для постоянного приема. Полный отказ от гипотензивных препаратов возможен, если верхнее АД при продолжающихся процедурах фонирувания не превышает 160 мм. рт. ст.


Схема 5. Фонирувание при гипертонии 1-3 степени, когда вечером повышается только верхнее (систолическое) АД.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | |
|-------|---|--|
| | Режим 2 | |
| | К | |
| 1-2 | 5 | |
| 3-8 | 10 | |
| 9-13 | 15 | |
| 14-19 | 20 | |
| 20-25 | 25 | |
| далее | 25-30 при гипертонии 1 степени, 30-40 при гипертонии 2-3 степени | |

Схема 6. Фонирувание при гипертонии 1-3 степени, когда вечером повышается и систолическое, и диастолическое АД.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | |
|-------|--|---------|----|----|------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | К | М | М5 | С | Е50* |
| 1-2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3-8 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 9-13 | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 14-19 | 25 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 20-25 | 30 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| далее | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |

*Е50 – грудной отдел позвоночника. См. рис. на стр. 15.

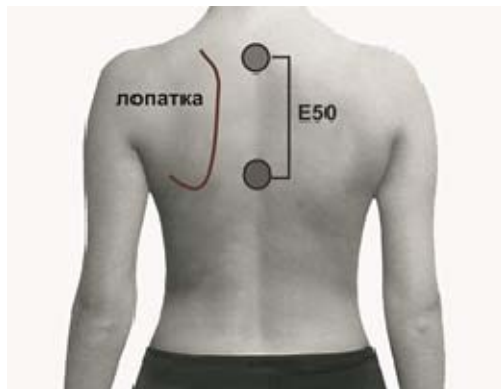

Методика № 2

Методика № 2 применяется при гипертонии 1-3 степени, если **верхнее АД без приема лекарств, понижающих давление, утром на 10 и более единиц больше, чем вечером** (гипертензия, вызванная сосудистой недостаточностью). Гипотензивные лекарственные препараты при этом типе гипертонии, как правило, не эффективны, поэтому процедуры проводят без медикаментозной терапии. Фонирующие проводят по **схеме 7**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Особенности установки виброфонов в области глаз указаны на рис. 10 центрального вкладыша методик.

Схема 7. Фонирование при гипертонии 1-3 степени, если верхнее (систолическое) АД утром на 10 и более единиц больше, чем вечером.

| Неделя | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | |
|--------|--|---------|------------|----|-------------|------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | | |
| | К | М | Левый глаз | D1 | Правый глаз | E50* |
| 1-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3-6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7-10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| далее | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |

*E50 – грудной отдел позвоночника. См. рис. на стр. 15.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Цель фонирования. Восстановление области, пораженной болезнью. Для этого необходимо восстановление нейромышечной амортизации, удаление погибших клеток из пораженной области и замена их здоровыми, насыщение клеток ресурсами. С помощью фонирования можно полностью компенсировать дефицит микровибрации в заданной области.

Методика фонирования позвоночника

Фонирование проводят по **схемам 8-15** в положении лежа на спине.

При наличии проблем в нескольких отделах позвоночника (например, остеохондроз шейного отдела и межпозвоночная грыжа в пояснично-крестцовом отделе) выбирают одну схему для наиболее проблемной области. При умеренной степени деградации позвоночника возможно фонирование по двум схемам одновременно, при этом в один день фонирование по каждой из схем следует проводить с интервалом не менее 4 часов.

Если пользователь страдает гипертонической болезнью, то в процессе проведения процедур следует контролировать артериальное давление до начала процедуры и через 30 минут после ее завершения. Оно может изменяться. Давление необходимо поддерживать на оптимальном уровне, когда наблюдается наилучшее самочувствие и наивысшая работоспособность. При применении гипотензивных препаратов фонирование **области почек (К)** может вызвать избыточное снижение артериального давления. В этом случае необходимо откорректировать (сократить) дозы лекарственных препаратов, чтобы поддерживать давление на оптимальном уровне. В случае роста давления, при появлении головокружения или слабости уменьшают длительность процедур на область позвоночника.

При аритмии сердца и после перенесенного инфаркта миокарда фонирование грудного отдела позвоночника проводят по схеме 9А: воздействие на грудной отдел (Е11, Е2, Е21) начинают с минимального времени (1 минута) и увеличивают его очень постепенно.

Возможность обострения. При наличии хронических болезней позвоночника могут временно обостряться болезненные ощущения, но одновременно с этим увеличивается подвижность в области воздействия. Это свидетельствует о восстановлении кровоснабжения нервных путей и является положительным

изменением в состоянии позвоночника. Проведение процедур не прекращают. Чем равномернее процедуры проводятся в течение суток, тем выше эффект и тем ниже вероятность обострения болезненных ощущений.

Продолжительность курса в большой степени зависит от тяжести, продолжительности и характера заболевания и колеблется при остеохондрозе и радикулите в пределах от нескольких дней до нескольких месяцев. При грыжах межпозвоночных дисков и сколиозе для стойкой и полной реабилитации потребуется от одного до трех лет (зависит от тяжести заболевания).

Дополнение к схемам. В целях очистки крови (как следствие, улучшения качества питания клеток организма) все схемы фонирувания позвоночника можно дополнить воздействием на область печени (М или М5 при наличии камней в желчном пузыре, рис. 8 на центральном вкладыше методик). Начальное время - 5 минут, прибавляя по 1-2 минуте через каждые 2-3 дня довести время воздействия до 10-15 минут.

Остеохондроз, радикулит

Фонирование проводят **по схемам 8-11** в зависимости от того, в каком отделе позвоночника имеется остеохондроз, радикулит (шейном, грудном, поясничном, пояснично-крестцовом). Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки**.

Соотнесите проблемную область с обозначением областей воздействия на рис. 6 и 9 на центральном вкладыше методик. Выберите схему, в которой указана проблемная область.

Схема 8. Фонирувание при остеохондрозе, радикулите шейного отдела позвоночника.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | |
|-------|--|---------|----|----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | D1* | D2 | E1 |
| 1-3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4-9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 10-15 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| далее | 15 | 5 | 5 | 5 |

*Для установки виброфонов в области **D1** и **D2** под шею подкладывают подушку так, чтобы виброфоны достаточно плотно прилегали к шее.

Схема 9. Фоноирование при остеохондрозе, радикулите грудного отдела позвоночника.

| День | Режим, области и время фоноирования (мин) | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | Е11 | Е2 | Е21 |
| 1-3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4-9 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 10-15 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| далее | 24 | 8 | 8 | 8 |

Схема 9А. Фоноирование при остеохондрозе, радикулите грудного отдела позвоночника при аритмии сердца и после перенесенного инфаркта миокарда.

| День | Режим, области и время фоноирования (мин) | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | Е11 | Е2 | Е21 |
| 1-3 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 4-8 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| 9-13 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 14-18 | 25 | 3 | 3 | 3 |
| далее | 30 | 5 | 5 | 5 |

Схема 10. Фоноирование при остеохондрозе, радикулите поясничного отдела позвоночника.

| День | Режим, области и время фоноирования (мин) | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | Е21 | Е3 | Е31 |
| 1-3 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 4-9 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 10-15 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| далее | 30 | 10 | 10 | 10 |

Схема 11. Фомирование при остеохондрозе, радикулите пояснично-крестцового отдела позвоночника.

| День | Режим, области и время фомирования (мин) | | | |
|-------|--|---------|-----|---------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | Режим 2 |
| | К | ЕЗ | ЕЗ1 | Е4 |
| 1-3 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 4-9 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 10-15 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| далее | 30 | 10 | 10 | 10 |

Грыжа межпозвонкового диска

Фомирование проводят по **схеме 12**. Процедуры повторяют **3-4** раза в сутки первые три месяца, в последующие — **2** раза в сутки.

Схема 12. Фомирование при межпозвонковой грыже.

| День | Режим, области и время фомирования (мин) | | |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | |
| | К | Слева и справа от области грыжи | Сверху и снизу от области грыжи |
| 1-2 | 6 | 3 | 3 |
| 3-7 | 8 | 4 | 4 |
| 8-12 | 10 | 5 | 5 |
| 13-17 | 12 | 6 | 6 |
| 18-22 | 16 | 8 | 8 |
| далее | 20 | 10 | 10 |

Сколиоз

Фонирование проводят по **схеме 13**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки**.

Схема 13. Фонирование при сколиозе.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | |
|-------|--|---------|----|----|----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | К | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 |
| 1-2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3-7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8-12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| далее | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Боль в спине

Цель фонирования – восстановление и поддержание мышечных ресурсов, уменьшение отека и боли.

Методика. Фонирование проводят по **схемам 14, 15** в зависимости от силы боли. В схемах приняты следующие обозначения:

S7 – область мышц спины на 7 см выше области боли;

S3 – область мышц спины на 3 см выше области боли;

S↔ – слева и справа на 2-3 см от позвоночника на уровне боли;

S↑ – вдоль позвоночника выше и ниже на 2-3 см области боли.

Продолжительность курса: 7 дней. Даже при полном исчезновении боли и скованности движений после нескольких процедур программу первого 7-дневного курса необходимо выполнить полностью. Это важно для предупреждения повтора возникновения болей и различных осложнений на внутренние органы.

После 7-дневного курса схему фонирования выбирают в зависимости от диагноза (радикулит, грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз).

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что если одновременно с острой болью в пояснице появилось нарушение мочеиспускания (острая задержка мочи), необходимо срочно обратиться за медицинской помощью к нейрохирургу. Такое осложнение может быть связано с формированием свободного фрагмента грыжи межпозвонкового диска и сдавливанием им корешков спинного мозга.

Схема 14. Фони́рование при возникновении сильных болей в спине.

| День | Кол-во процедур в сутки | Режим, области и время фони́рования (мин) | | | | |
|------|-------------------------|---|---------|----|----|----|
| | | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | | К | S7 | S3 | S↔ | S↓ |
| 1-2 | 6 | 10 | 4 | 2 | - | - |
| 3-4 | 3 | 20 | - | 3 | 5 | 5 |
| 5-7 | 2 | 30 | - | - | 10 | 10 |

Схема 15. Фони́рование при возникновении умеренных болей в спине.

| День | Кол-во процедур в сутки | Режим, области и время фони́рования (мин) | | | | |
|------|-------------------------|---|---------|----|----|----|
| | | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | | К | S7 | S3 | S↔ | S↓ |
| 1-2 | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3-4 | 3 | 25 | - | - | 8 | 8 |
| 5-7 | 2 | 30 | - | - | 10 | 10 |

Методика фони́рования суставов

Фони́рование проводят по **схемам 16-20** в положении лежа на спине. За один курс можно лечить не более двух суставов.

Возможность обострения в области сустава. При фони́ровании сустава иногда после нескольких процедур наступает обострение болезненных ощущений и временное усиление отека. Это связано с тем, что благодаря микровибрации усиливаются иммунные реакции.

Чтобы улучшить переносимость и уменьшить болезненность, можно внести следующие изменения в схему таким образом, чтобы фони́рование переносилось легко, в частности:

1) при фони́ровании сустава вместо режима 2 применять режим 1. Затем через некоторое время вернуться к режиму 2;

2) уменьшить время фони́рования сустава в течение одной процедуры. Количество процедур в сутки сокращать не рекомендуется;

3) перейти к фони́рованию только одного сустава, если процедуры выполнялись одновременно в отношении двух суставов.

Возможность обострения в области позвоночника. При наличии хронических болезней позвоночника после нескольких

процедур возможны болезненные ощущения. Это свидетельствует о восстановлении кровоснабжения нервных путей. Проведение процедур не прекращают, однако сокращают время проведения одной процедуры на данную область.

Сочетание с лекарственной терапией. Фомирование можно сочетать с противовоспалительными средствами.

ВАЖНО! Не рекомендуется проводить процедуры на суставе, в область которого была введена гиалуроновая кислота в течение одного года, так как влияние фомирования **на рост или снижение эффективности** таких инъекций не проводилось.

Продолжительность курса. Продолжительность курса в большой степени зависит от тяжести, продолжительности и характера заболевания. При незапущенном заболевании курс (до исчезновения болей и формирования нормальной подвижности сустава) колеблется в пределах от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от суммарного времени фомирования. При запущенном заболевании могли развиваться необратимые процессы, и тогда фомирование сможет только препятствовать дальнейшей деградации и некоторому снижению болезненности.

Артроз, артрит, повреждения мениска

Методика. Фомирование проводят по **схемам 16-18** в зависимости от сустава, в котором имеется проблема. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Не рекомендуется проводить фомирование более двух суставов. При фомировании **двух суставов** – время фомирования почек (К) должно быть равно сумме времени фомирования двух суставов (например, если каждый сустав фомируется в течение 20 минут, то время фомирования почек должно быть 40 минут).

Суставы рук

Схема 16. Фомирование при заболевании суставов рук.

| День | Режим, области и время фомирования (мин) | | | | |
|-------|--|---------|---------|----|--------|
| | Режим 2 | | Режим 1 | | |
| | К | Сустав* | D2 | E1 | ПКЛУ** |
| 1-2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3-6 | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 7-10 | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| далее | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 |

***Сустав** – пример установки виброфонов показан на рис.4 центрального вкладыша методик. Виброфоны лучше фиксировать с помощью специальных манжет.

** **ПКЛУ** – подключичные лимфатические узлы, рис. 8 центрального вкладыша методик.

В целях очистки крови (как следствие, улучшения качества питания клеток организма) **схему 16** можно **дополнить фомированием печени** (область М или М5 при наличии камней в желчном пузыре, рис. 8 центрального вкладыша). Начальное время - 5 минут, прибавляя по 1-2 минуте через каждые 2-3 дня довести до 10-15 минут.

Суставы ног

При заболеваниях суставов ног **схема 17** является основной. Однако в целях очистки крови, а также для улучшения состояния мышц, которые испытывают нагрузку при ходьбе, основную схему 17 рекомендуется дополнять выполнением **схемы 18**.

Схема 17. Фомирование при заболевании тазобедренного, коленного, голеностопного сустава (артроз, артрит, незапущенное отслоение мениска).

| День | Режим, области и время фомирования (мин) | | | | | |
|-------|--|---------|---------|-----|----|-------|
| | Режим 2 | | Режим 1 | | | |
| | К | Сустав* | E3 | E31 | E4 | ПЛУ** |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2-5 | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6-10 | 24 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| далее | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

***Сустав** – пример установки виброфонов показан на рис.5 центрального вкладыша методик. Виброфоны лучше фиксировать с помощью специальных манжет.

****ПЛУ** – область паховых лимфатических узлов той ноги, на которой находится пораженный сустав. Виброфоны устанавливают, как показано на рис. 3 на обложке методик.

Схема 18. Дополнительная схема при фонировании тазобедренного, коленного, голеностопного сустава (артроз, артрит, незапущенное отслоение мениска).

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | |
|-------|--|----------------------|---------|
| | Режим 2 | | Режим 1 |
| | Мышцы левой голени* | Мышцы правой голени* | М |
| 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2-5 | 6 | 6 | 6 |
| 6-10 | 8 | 8 | 8 |
| далее | 10 | 10 | 10 |

* Виброфоны в области голени устанавливают на передние и задние мышцы, как показано на рис. 5 центрального вкладыша.

Пяточная шпора

Цель фонирования. Фонирование способствует утилизации погибших клеток из области пятки, а также восстановлению тонуса мышц голени для улучшения работы системы нейромышечной амортизации.


Методика. Фонирование проводят по **схеме 19**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Схема 19. Фонирование при пяточной шпоре.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | |
|-------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | Режим 2 | | | Режим 4 |
| | К | Область пятки (рис. а)* | Мышцы голени** | Область пятки (рис. б)* |
| 1-2 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3-4 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| далее | 20 | 10 | 10 | 10 |

***Область пятки (рис. а, рис. б)** – пример установки показан ниже.

****Мышцы голени** - передняя и задняя мышцы голени той ноги, на которой образовалась пяточная шпора. Пример установки виброфонов показан на рис. 5 центрального вкладыша методик.

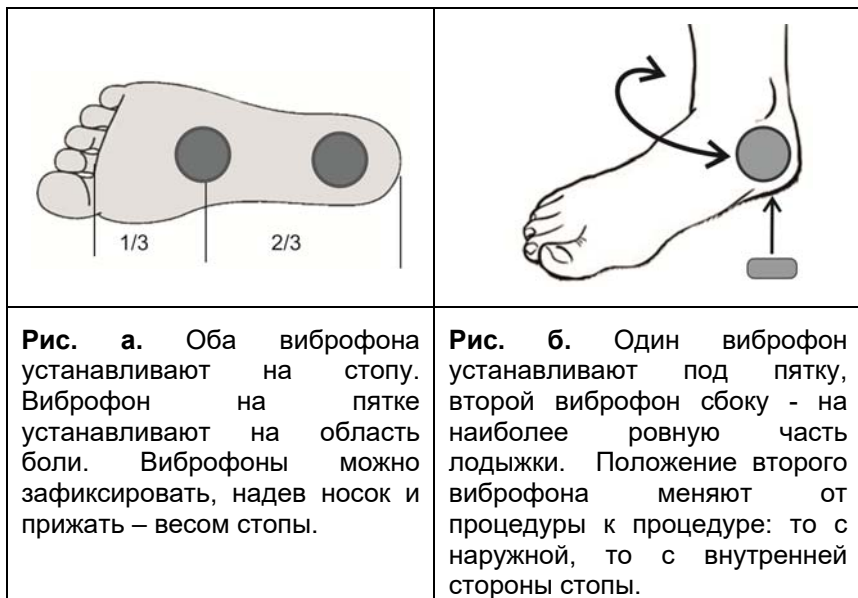

Подагра

Цель фонирования. Фонирование области почек (К) способствует выведению (удалению) из организма мочевой кислоты и замедлению образования уратов.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 20**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Схема 20. Фонирование при подагре.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|-------|--|-----------------------------|
| | Режим 2 | |
| | К | Область пораженного сустава |
| 1 | 10 | 5 |
| 2-5 | 20 | 10 |
| 6-10 | 30 | 20 |
| далее | 40 | 30 |

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Аденома предстательной железы

Цель фонирувания. Фонирувание при аденоме предстательной железы (доброкачественной гиперплазии) улучшает лимфоотток, снимает отек, что позволяет организму утилизировать избыток погибших клеток из данной области. Процедуры также способствуют укреплению мышц мочевого пузыря, мышц тазового дна. В результате рост аденомы останавливается, существенно улучшается струя мочи, сокращается число мочеиспусканий, уменьшается количество остаточной мочи. Перед применением необходимо убедиться в отсутствии злокачественных новообразований в простате по критерию ПСА (простатического специфического антигена) или иным способом.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 21**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки**. Фонирувание проводят лежа на спине. При необходимости под область таза подкладывают небольшую подушку.

Продолжительность курса. Курс фонирувания длится 3 месяца, и его следует повторять 2 раза в год. Остальное время года проводят поддерживающие процедуры: 1-2 раза в неделю или по 1-2 процедуры в течение суток после каждого полового акта.

Схема 21. Фонирувание при аденоме предстательной железы.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|------------|------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | Режим 2/ Режим 4 |
| | К | Е3 | Е4 | Е31 | П и МП* |
| 1-2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 3-5 | 20 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 6-8 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| далее | 40 | 10 | 10 | 5 | 15 |

***П и МП (промежность и мочевого пузыря):** один виброфон устанавливают в области промежности (П) в промежутке между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой. Одновременно второй виброфон устанавливают на область мочевого пузыря (МП) – в нижней части живота так, чтобы центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см. При фонирувании области П и МП режим 2 чередуют с режимом 4 от процедуры к процедуре.

Простатит

Цель фонирувания. Фонирувание проводят с целью улучшения работы специальных мышечных клеток, обеспечивающих семяизвержение и эрекцию, а также с целью улучшения лимфооттока. Это позволяет организму утилизировать избыток погибших клеток из области предстательной железы и ее протоков. Вывод погибших клеток – обязательное условие излечения простатита.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 22** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **3 раза в сутки первый месяц, далее – 2 раза в сутки.**

Фонирувание можно совмещать с лекарственной терапией. Лечение острого простатита сочетают с применением антибиотиков, назначенных урологом.

Если при выполнении процедур по **схеме 22** эффект недостаточен, вероятно есть другие факторы, которые способствуют поддержанию воспалительного процесса.

1) Наиболее вероятной причиной может быть большой процент погибших сперматозоидов, поступающих из яичка. К сожалению, проводимые анализы спермы не дают сведений о количестве погибших сперматозоидов среди неподвижных сперматозоидов. Количество неподвижных может быть в норме, но процент погибших уже может оказаться достаточным для поддержания воспаления.

2) Другой причиной, тормозящей выздоровление, может быть грыжа межпозвонкового диска в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Если имеется грыжа, то сначала необходимо пройти курс по **методике фонирувания при межпозвонковой грыже**, а также соблюдать меры по защите здоровья позвоночника.

3) Третьей причиной, поддерживающей воспалительный процесс, могут быть камни в предстательной железе (**калькулезный простатит**). При калькулезном простатите воздействие на область П и МП не проводят, а заменяют ее на фонирувание **паховых лимфатических узлов (ПЛУ)**. Фонирувание проводят по **схеме 23**. Фонирувание не оказывает воздействие непосредственно на уже образовавшиеся в простате кальцинаты, однако улучшает лимфоток в этой области.

Возможность обострения. Если простатит сочетается с заболеванием мочевого пузыря, в первые дни с мочой могут выходить продукты очистительно-восстановительных процессов. Через несколько дней моча становится прозрачной, боли проходят,

значительно сокращается число мочеиспусканий, улучшается потенция, удлиняется половой акт.

При хроническом простатите, даже при постепенном увеличении времени процедуры, может возникнуть обострение болезненности в области предстательной железы. Процедуры не прекращают, однако некоторое время не увеличивают время фонирувания до исчезновения болезненности.

При наличии не выявленных патологий в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, через несколько дней могут появиться болезненные ощущения в области поясницы или даже боль, отдающая в ногу или другие области нижней части тела. В этом случае для уменьшения остроты реакции организма возвращаются к началу и продолжают с первого дня схемы фонирувания.

Продолжительность курса. Фонирувание продолжают до достижения необходимого результата. Продолжительность курса зависит от общего состояния и от степени анатомических нарушений в простате. По достижении желаемого результата во избежание рецидива проводят поддерживающие процедуры **1-2 раза в сутки** 4-6 раз в неделю.

Схема 22. Фонирувание при простатите.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | |
|-------|--|---------|-----|----|---------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | Режим 2 |
| | К | Е3 | Е31 | Е4 | П и МП* |
| 1-3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 4-10 | 22 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| далее | 35 | 10 | 5 | 5 | 15 |

* **П и МП (промежность и мочевого пузыря):** один виброфон устанавливают в области промежности (П) в промежутке между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой, а второй виброфон устанавливают на область мочевого пузыря (МП) – в нижней части живота так, чтобы центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см. При необходимости под область таза подкладывают небольшую подушку.

Схема 23. Фонирувание при калькулезном простатите. Процедуры повторяют 2-3 раза в сутки.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | |
|-------|--|---------|-----|----|--------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | К | Е3 | Е31 | Е4 | верхние ПЛУ* |
| 1-3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4-9 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 10-15 | 25 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| далее | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |

* **Верхние ПЛУ** - виброфоны устанавливают симметрично на верхние паховые лимфатические узлы (рис. 3 на обложке методик).

Улучшение потенции, преждевременная эякуляция

Цель фонирувания. Фонирувание мышечных структур в области промежности и мочевого пузыря (области П и МП) способствует насыщению мышечных клеток ресурсами, и, соответственно, усиливает величину эрекции. Фонирувание области позвоночника (области **Е3, Е31, Е4**) улучшает проводимость нервных путей управления эрекцией, что способствует увеличению продолжительности эрекции.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 24**. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки**. Иногда достаточно местного воздействия на промежность и область мочевого пузыря (П и МП), но эффект пропорционален суммарной накопленной дозе и количеству областей фонирувания.

Фонирувание проводят лежа на спине. При необходимости под область таза подкладывают небольшую подушку.

Продолжительность курса: 1-3 месяца, далее профилактически по 1-2 процедуры в течение суток после полового акта.

Схема 24. Фомирование для улучшения потенции.

| День | Режим, области и время фомирования (мин) | | | | |
|-------|--|-----------|------------|-----------|----------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | Режим 2 |
| | К | ЕЗ | ЕЗ1 | Е4 | П и МП* |
| 1-2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3-6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 7-10 | 16 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| далее | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 |

* **П и МП (промежность и мочевоу пузырь)**: один виброфон устанавливают в области промежности (П) в промежутке между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой. Одновременно второй виброфон устанавливают на область мочевого пузыря (МП) – в нижней части живота так, чтобы центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Болезненные менструации

Цель фонирувания. Фонирувание способствует нормализации и согласованию тонуса всех мышечных слоев в области матки. Это способствует легкости и безболезненности очистительного процесса.

Методика. Фонирувание начинают до начала менструации (сразу после предыдущей менструации). Первый курс фонирувания проводят по **схеме 25**, последующие курсы – по **схеме 26**. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки 6-7 дней в неделю**.

Схема 25. Фонирувание при болезненных менструациях. Первый курс.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | |
|-----------------------------|--|-------------|----|----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | Низ живота* | Е3 | Е4 |
| 1-3 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 4-9 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 10-15 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| далее до начала менструации | 18 | 8 | 5 | 5 |
| период менструации | 20 | 10 | 5 | 5 |

Схема 26. Фонирувание при болезненных менструациях. Повторные курсы.

| Период | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | |
|----------------------------|--|-------------|----|----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | Низ живота* | Е3 | Е4 |
| период между менструациями | 20 | 7 | 5 | 5 |
| период менструации | 20 | 3 | 5 | 5 |

***Низ живота** – виброфоны ставят на область боли над лобковой костью. В период менструации область боли (низ живота) фонируют дополнительно каждые два часа по 5 минут.

Нарушение менструального цикла

Цель фонирования. Фонирование способствует улучшению питания функциональных клеток и нормализации их цикловой активности.

Методика. Фонирование проводят по **схемам 25 и 26**. Первый курс проводят по схеме 25. Его начинают сразу после окончания менструации, если менструации отсутствуют – в любой день. Повторные курсы проводят по схеме 26.

Подготовка к беременности

Цель фонирования – увеличение общих ресурсов женщины с акцентом на ресурсах детородных органов.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 27** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки 5-6 дней в неделю**.

Продолжительность курса. 3-х месячная программа подготовки к беременности.

Схема 27. Фонирование для подготовки к беременности.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | |
|-------|--|-------------|----|-----|----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | К | Низ живота* | Е3 | Е31 | Е4 |
| 1-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4-6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7-9 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10-12 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| далее | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 |

***Низ живота** – два виброфона ставят рядом, сразу над лобковой костью.

Улучшение лактации

Цель фонирования – улучшение питания клеток молочных желез и активация лактации.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 28**. Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки** после кормления.

Продолжительность курса: весь период кормления и еще 2 недели.

Лактостаз

Цель фонирования – устранение застойных явлений в протоках молочных желез, профилактика их появления.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 28**. Виброфоны устанавливают выше соска на область молочных желез. Процедуры повторяют **4 раза в сутки**. После фонирования можно приложить ребенка к груди, при этом необходимо соблюдать рекомендации врачей по прикладыванию ребенка во время грудного вскармливания.

Продолжительность курса: до исчезновения симптомов и еще 2 дня после.

Схема 28. Фонирование при лактостазе, а также для улучшения лактации.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|-----------|--|-----------------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 |
| | К | молочные железы выше соска |
| 1 и далее | 10 | 5 |

Серозный мастит

Цель фонирования – устранение застойных явлений, улучшение лимфодренажа и повышение местного иммунитета, ускорение заживления трещин, через которые может проникнуть инфекция.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 29**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки 7 дней в неделю**.

Схема 29. Фонирование при серозном мастите.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | D2 | E1 | область заболевания* |
| 1 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2-3 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 4-6 | 14 | 3 | 3 | 8 |
| 7-14 | 16 | 3 | 3 | 10 |

*Виброфоны устанавливают рядом с болезненными уплотнениями на здоровые ткани груди, расположенные ближе к подмышечной впадине.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Неудержание мочи

Цель фонирования – улучшение питания мышц сфинктера шейки мочевого пузыря, восстановление иннервации.

Продолжительность курса. Как правило, через 1 - 2 недели произвольные потери мочи становятся реже, а количество меньше. Однако для устойчивого и полноценного эффекта потребуются выполнять фонирование в течение 1-3 месяцев. При тяжелой степени расстройства может потребоваться больше времени.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 30**. Эффект пропорционален количеству процедур в неделю, но польза есть даже от одного фонирования.

Важной составляющей является фонирование пояснично-крестцового отдела позвоночника (**Е3, Е4**). Из-за проблем в этой области (грыжа, остеохондроз, травма, операция и др.) может быть нарушено питание и соответственно проводимость нервных путей, по которым передается управление на мышцы сфинктера. Нередко это является первопричиной неудержания мочи. Фонирование **области почек (К)** улучшает их функцию, что благотворно сказывается на состоянии всей мышечной системы организма. В результате улучшается самочувствие и повышается работоспособность.

Схема 30. Фонирование при неудержании мочи.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | |
|-------|--|-----|-----|---------|----|
| | Режим 2 | | | Режим 1 | |
| | К | МП* | П** | Е3 | Е4 |
| 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | 24 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| далее | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 |

* **МП** - два виброфона устанавливают рядом сразу над лобковойостью. При гиперактивном мочевом пузыре область МП не фонировать, а вместо нее фонировать верхние паховые лимфатические узлы (верхние ПЛУ), как показано на рис. 3 на обложке методик

** **П** - область уретрального сфинктера со стороны промежности (оба виброфона). Женщины один виброфон устанавливают на

Рис. 4. Установка виброфонов в области рук.



Рис. 5. Установка виброфонов в области ног.



Рис. 6. Области воздействия D1, D2, E1, E11, E2, E21.

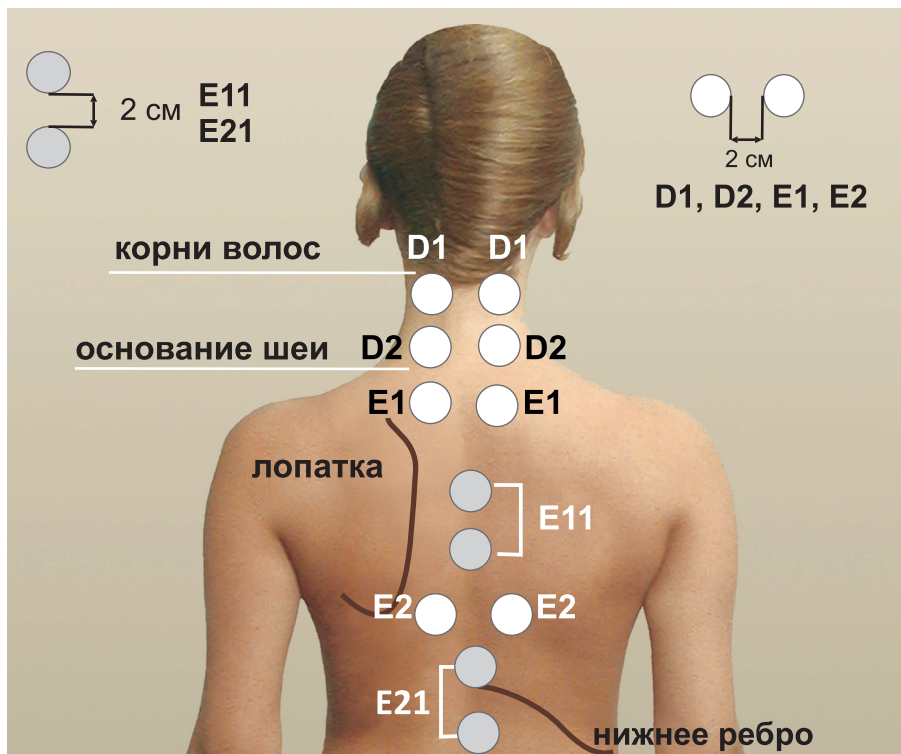


Рис. 7. Область M9 (поджелудочная железа).

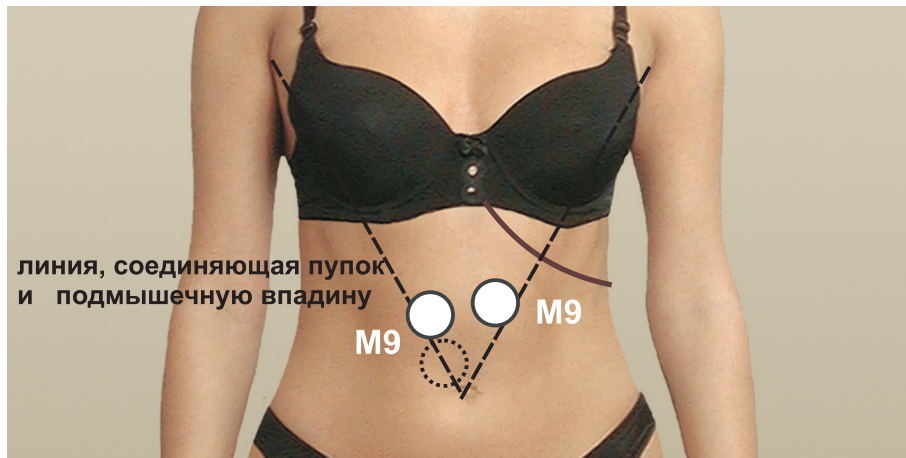


Рис. 8. Области воздействия С, ПКЛУ, М5, М.


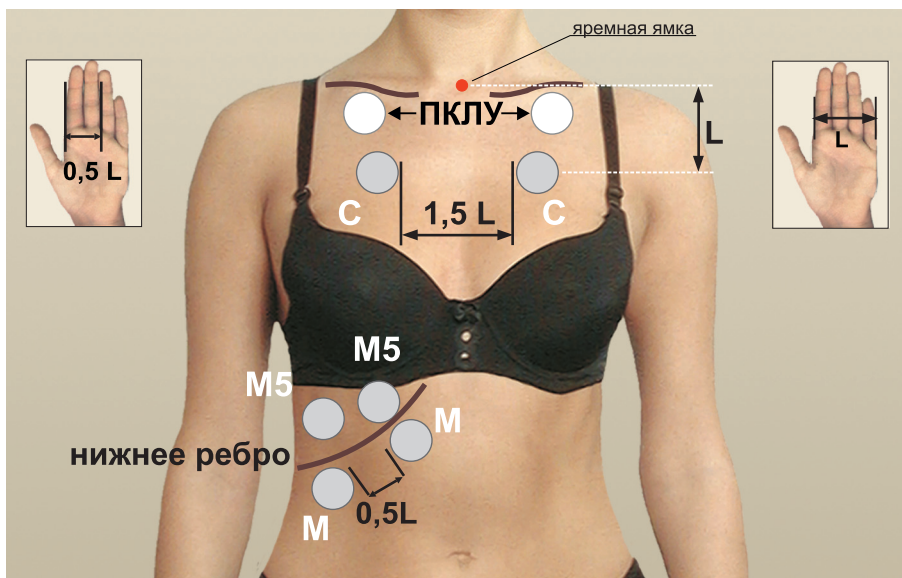


Рис. 9. Области воздействия F, K, E3, E31, E4.

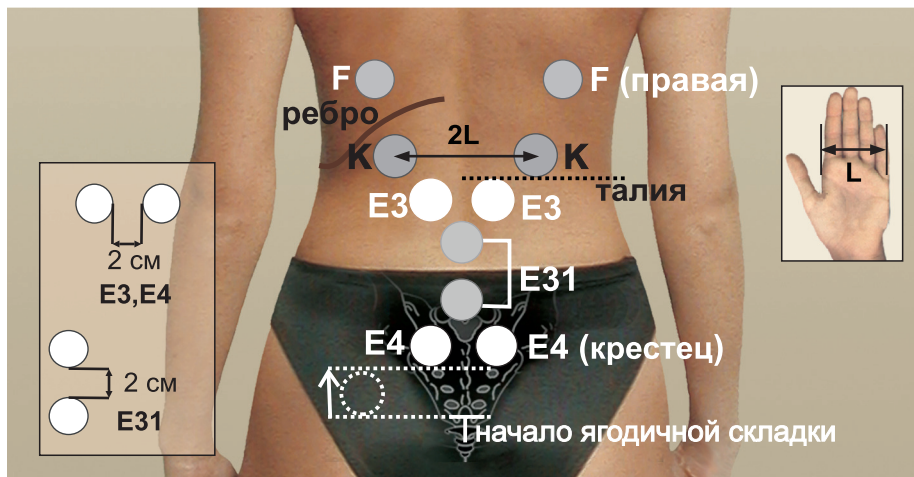

К (почки) - виброфоны устанавливают выше талии, но ниже ребер, которые прощупываются со стороны спины. При опущении почек виброфоны устанавливает на уровне талии.


E3 - виброфоны устанавливают ниже линии талии.

E4 - виброфоны устанавливают на расстоянии одного виброфона выше от начала ягодичной складки (на область крестца).

Рис. 10. Установка виброфонов в области глаза.



Рис. 11. Области воздействия А, А1, В, В1.

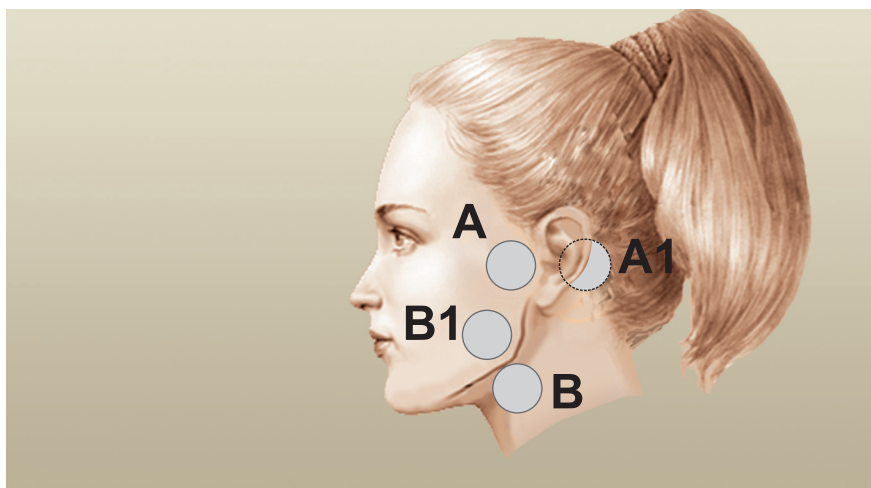

область мочеиспускания, второй – рядом. Мужчины оба виброфона устанавливают в промежутке между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой.

Пиелонефрит (хронический)

Цель фонирования – повышение местного иммунитета, улучшение кровоснабжения, лимфооттока.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 31**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. В острой фазе хронического пиелонефрита фонирование проводится в сочетании с медикаментозной терапией, в стадии ремиссии – без нее.

Возможность обострения. Лечение хронического пиелонефрита может протекать с временным обострением. Процедуры фонирования не прекращают.

Продолжительность курса. Фонирование проводят до выздоровления (отсутствие симптомов заболевания и нормальные анализы мочи). Далее поддерживающие процедуры: фонировать только **области почек (К) и печени (М)** 1-2 раза в сутки 5-7 дней в неделю.

Схема 31. Фонирование при пиелонефрите.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | |
|-------|--|---------|----|--------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | М | Е2 | Нижняя Е11 и верхняя Е21 |
| 1-2 | 2 | - | - | - |
| 3-8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 9-14 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 15-20 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| далее | 30 | 16 | 7 | 7 |

Почечная недостаточность

Цель фонирувания. Фонирувание компенсирует дефицит микровибрации, улучшает кровоснабжение и лимфоотток в **области почек (К)**. Воздействие на область грудного отдела позвоночника восстанавливает проводимость нервных путей, связывающих почки с корой головного мозга.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 32**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Продолжительность курса: 3 месяца. Курс повторяют 2 раза в год. В остальное время проводят поддерживающие процедуры: фонируют только **области почек (К) и печени (М)** 2 раза в сутки каждый день.

Схема 32. Фонирувание при почечной недостаточности.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | |
|-------|--|---------|----|--------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | М | Е2 | Нижняя Е11 и верхняя Е21 |
| 1-2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3-6 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 7-10 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 11-15 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 16-20 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| далее | 28 | 14 | 7 | 7 |

Цистит и нарушение мочеиспускания

Цель фонирувания. Фонирувание проводят с целью улучшения кровоснабжения и снятия отека в области малого таза, мочевого пузыря и нормализации тонуса мышц мочевого пузыря. Это позволяет устранить болевые ощущения, воспалительные явления в мочевом пузыре, нормализовать мочеиспускание, устранить причину недержания и улучшить общее состояние.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 33**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. В стадии обострения цистита фонирувание выполняется в сочетании с медикаментозной терапией. В стадии ремиссии фонирувание можно проводить без противовоспалительных средств.

Возможность обострения. При наборе дозы, на 3-5 день увеличения времени фонирувания позвоночника, могут появиться болезненные ощущения, вызванные восстановлением чувствительности нервных тканей в зонах хронического отека. Фонирувание, несмотря на болезненность, продолжают.

Продолжительность курса: до полного выздоровления, далее переходят к поддерживающим процедурам: 1-2 раза в сутки 2-6 раз в неделю.

Схема 33. Фонирувание при цистите и нарушении мочеиспускания.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | |
|-------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | Режим 2 |
| | К | Е3 | Е31 | Е4 | МП* |
| 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2-4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5-7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| далее | 23 | 8 | 8 | 8 | 15 |

*МП (мочевой пузырь) - оба виброфона устанавливают в нижней части живота над лобковой костью: женщины – сразу над лобковой костью, мужчины чуть выше - так, чтобы центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см.

Энурез

Цель фонирования. Фонирование улучшает кровоснабжение спинного мозга и органов физиологического отправления, усиливая тем самым мощность сигналов в мозг.

ВАЖНО! Методика наиболее эффективна при вторичном энурезе. В случае первичного энуреза методика применяется обязательно в комплексе с другими видами лечения, рекомендованными врачами-специалистами (в частности, неврологом).

Методика. Фонирование проводят по **схемам 34 и 35**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Процедура также позволяет фиксировать внимание ребенка на этом участке его организма, именно поэтому детям лучше проводить фонирование несколько раз в день.

Схема 34. Фонирование при энурезе для детей.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | |
|-------|--|---------|----|
| | Режим 1/Режим 2 | Режим 1 | |
| | МП* | Е3 | Е4 |
| 1-5 | 5 | 5 | 5 |
| далее | 10 | 10 | 10 |

*МП - область мочевого пузыря. Два вибрфона ставят рядом сразу над лобковой костью. Детям до 10 лет фонирование данной области проводят в режиме 1, детям старше 10 лет – в режиме 2. Если у ребенка имеются проблемы в шейном отделе позвоночника (например, была родовая травма) основную схему фонирования дополняют фонированием шеи по схеме 35.

Схема 35. Дополнительная схема фонирования при энурезе у детей.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|-------|--|----|
| | Режим 1 | |
| | D1 | D2 |
| 1-5 | 2 | 2 |
| далее | 3 | 3 |

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Хронический гастрит

Цель фонирования – нормализация тонуса мышечных тканей желудка, нормализация кислотообразования, улучшение кровоснабжения и регенеративного процесса в слизистой желудка. Здоровые клетки - основа иммунитета. Очистка тканей от погибших клеток и улучшение питания здоровых клеток способствует заживлению слизистой и выздоровлению.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 36** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки 5-7 дней в неделю**. Фонирование сочетается с медикаментозной терапией, но может проводиться и без нее.

Продолжительность курса – 3 месяца. Далее проводят повторные курсы по 1 месяцу 1-3 раза в год.

Схема 36. Фонирование при гастрите и дуодените.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | |
|-------|--|---|---|-----|----|-----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | | |
| | К | проекция области боли на живот | М | Е21 | Е2 | Е11 |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2-5 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 6-10 | 25 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 11-15 | 30 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| далее | 35 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 |

Дуоденит

Цель фонирования. Фонирование области боли является одним из наиболее эффективных методов восстановления слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Методика. Фонирование проводят по методике фонирования при гастрите (**схема 36**).

Запор

Цель фонирования. Фонирование способствует улучшению кровоснабжения и восстановлению питания мышечных клеток в области кишечника, а также восстановлению проходимости нервных путей, идущих от кишечника через область поясничного и крестцового отделов позвоночника.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 37** в положении лежа на спине. **Фонирование проводят только в комплексе с соответствующей диетой и лекарственной терапией (если она была назначена врачом).** Виброфоны в области промежности удерживаются вторым слоем плотного белья. Не рекомендуется удерживать виброфоны руками из-за неудобства положения, в особенности при наличии проблем в шейном отделе позвоночника. Фонирование промежности («П») можно провести также отдельно в положении сидя. При наличии геморроя при фонировании под ягодицы надо обязательно подложить небольшую подушку так, чтобы область живота была выше области сердца.

При недостаточности эффекта фонирование проводят по **схеме 38**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Если опорожнения не было более 5-7 дней, перед процедурой желательна клизма.

Продолжительность курса. Фонирование проводят до нормализации опорожнения кишечника и далее профилактически недельным курсом 2-4 раза в год.

Схема 37. Фонирование при запоре.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | |
|-------|--|----|---------|------|-----|
| | Режим 2 | | Режим 1 | | |
| | Е4 | Е3 | М12* | М13* | П** |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| далее | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Схема 38. Усиленная методика фонирования при запоре.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | |
|-------|--|----|---------|------|------|-----|
| | Режим 2 | | Режим 1 | | | |
| | К | Е4 | Е3 | М12* | М13* | П** |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2-5 | 18 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6-9 | 25 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| далее | 30 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 |

* **M12, M13** – виброфоны устанавливают по ходу толстого кишечника, в особенности в местах его изгиба (печеночный и селезеночный изгибы), как показано на рис. 3 обложки методик.

** **П** – оба виброфона устанавливают в области промежности: один виброфон устанавливают у анального отверстия, второй - сразу рядом (на промежность).

Геморрой

Цель фонирования. Фонирование способствует восстановлению тонуса венозных сосудов, а, соответственно, улучшает отток венозной крови из геморроидального сплетения. Фонирование поясничного и крестцового отделов позвоночника восстанавливает проводимость нервных путей и нормализует перистальтику кишечника. Результативность фонирования будет зависеть от того, сохранилась клапанная система внутри вен или нет. Если клапаны обратного тока крови не повреждены, то от геморроя можно избавиться полностью. Если же они не функционируют, то потребуются периодическое поддерживающее лечение.

Методика. К фонированию можно приступать только после установки диагноза врачом и при отсутствии острых осложнений, требующих госпитализации больного. Фонирование проводят по **схеме 39** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Фонирование сочетается с лекарственной терапией, назначенной врачом.

Если геморрою сопутствует хронический запор, то методики фонирования при геморрое (**схема 39**) и при запоре (**схема 37**) чередуют каждые 3-4 недели.

Возможность обострения. При хроническом заболевании иногда после первых нескольких процедур кровотечение может усиливаться, но вскоре прекращается. Фонирование в период усиления кровотечения не прекращают.

Продолжительность курса – 3 месяца и более до тех пор, пока продолжают улучшения. Далее проводят поддерживающие процедуры 1-5 раз в неделю.

Схема 39. Фонирование при геморрое.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | |
|-------|--|----|-----|----|----|
| | Режим 2 | | | | |
| | К | Е4 | Е31 | Е3 | П* |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-5 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6-9 | 20 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| далее | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 |

* П – оба виброфона устанавливают в области промежности: один виброфон устанавливают у анального отверстия, второй - сразу рядом (на промежность). При фонировании под ягодицы надо обязательно подложить небольшую подушку так, чтобы область живота была выше области сердца!

Колики

Цель фонирования – нормализация моторики кишечника и улучшение пищеварения.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 40**. Процедуры повторяют перед каждым кормлением.

Продолжительность курса – до нормализации пищеварения и уменьшения газообразования.

Схема 40. Фонирование при коликах у детей.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|-----------|--|-----------------|
| | Режим 1 | |
| | К | Область живота* |
| 1 и далее | 3 | 3 |

***Область живота** – виброфоны устанавливают по обе стороны от пупка на расстоянии 2 см.

Энкопрез

Цель фонирования. Фонирование улучшает кровоснабжение спинного мозга и органов физиологического отправления, усиливая тем самым мощность сигналов в мозг.

Методика. Фонирование проводят по **схемам 34 и 35 для энуреза**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Процедура также позволяет фиксировать внимание ребенка на этом участке его организма, именно поэтому детям лучше проводить фонирование несколько раз в день.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Аритмия

Цель фонирувания. Фонирувание проводят с целью улучшения состояния грудного отдела позвоночника (области E11, E2) и увеличения общих ресурсов организма (области K и M).

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 41** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Первые 1-2 недели одну процедуру желательно проводить в середине ночи. Это позволит избежать или уменьшить отек, обычно развивающийся ночью и являющийся причиной утренней скованности и нарушения кровоснабжения нервных путей.

Возможность обострения. Если причина аритмии связана с состоянием грудного отдела, то с началом фонирувания наблюдается обострение аритмических проявлений, которое вскоре сменяется улучшением. Далее аритмия уменьшается, но на некоторое время может появиться небольшая болезненность в области грудного отдела, которая тоже вскоре проходит.

Продолжительность курса – 3 месяца. Курс повторяют 2-3 раза в год.

Схема 41. Фонирувание при аритмии.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | |
|-------|--|---------|-----|----|---------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | К | М | E11 | E2 | E1/E21* |
| 1-2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3-8 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 9-14 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 15-20 | 26 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| далее | 30 | 10 | 7 | 7 | 6 |

* Области E1 и E21 чередуют от процедуры к процедуре.

Стенокардия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Цель фонирувания. Фонирувание осуществляется с целью уменьшения артериального давления, уменьшения запаздывания расслабления аорты, улучшения питания сердечной мышцы и увеличения общих мышечных ресурсов. В результате уменьшается нагрузка на сердце.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 42**. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки 5-7 дней в неделю**.

Продолжительность курса – 3 месяца. Курс повторяют 2-3 раза в год.

Схема 42. Фонирувание при ИБС, стенокардии.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | | |
|-------|--|---------|----|----|-----|----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | | |
| | К | С | М | Е1 | Е11 | Е2 |
| 1-2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
| 3-8 | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
| 9-14 | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| 15-20 | 25 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 21-26 | 30 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| далее | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |

Последствия инсульта

Цель фонирувания – увеличение общих ресурсов организма, что позволит ускорить темп восстановления и повысить степень реабилитации.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 43**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки первые три месяца, далее 1-3 раза в сутки 5-7 дней в неделю**. Фонирувание начинают, когда все реанимационные мероприятия завершены и состояние стабильное (примерно через 1-3 месяца после инсульта).

Продолжительность курса. Фонирувание продолжают 3 месяца и более до тех пор, пока идут улучшения. Далее – повторные курсы по три месяца 2-3 раза в год.

Схема 43. Фонирувание для реабилитации после инсульта.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | |
|-------|--|---------|
| | Режим 2 | Режим 1 |
| | К | М |
| 1-2 | 5 | 5 |
| 3-8 | 10 | 7 |
| 9-14 | 20 | 12 |
| 15-20 | 25 | 14 |
| 21-26 | 30 | 15 |
| далее | 40 | 15 |

Трофические язвы на ногах

Цель фонирования. Улучшение регенеративного процесса за счет нормализации локального кровообращения, лимфотока.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 44**. Схема разделена на 2 части: в каждую процедуру необходимо выполнить обе части. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки 5-7 дней в неделю**. Область трофической язвы можно дополнительно фонировать еще 1 раз в сутки.

Внимание! В области тромба (ближе 10 см от него) воздействие не проводить.

Один раз в день перед вечерней процедурой края язвы протирают салфеткой, смоченной антисептиком, захватывая при этом 5-10 мм пораженной области. Виброфоны устанавливают по краям язвы. В период фонирования мази не применяют.

Продолжительность курса – до полного заживления язв плюс 1 неделя.

Схема 44. Фонирование при трофической язве. Часть 1.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | |
|-------|--|---------|----|----|--------------------------|-------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | | |
| | К | М | Е4 | Е3 | область подколенной ямки | ПЛУ** |
| 1-2 | 10 | 5 | 2 | 2 | - | 1 |
| 3-6 | 18 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 7-10 | 26 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| далее | 32 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |

* **Область подколенной ямки** – рис.5 центрального вкладыша.

** **ПЛУ** – область паховых лимфатических узлов той ноги, которая поражена трофической язвой. Рис. 3 на обложке методик.

Схема 44. Фонирование при трофической язве. Часть 2.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|-------|--|-----------------------------|
| | Режим 1 | |
| | сверху и снизу области язвы | слева и справа области язвы |
| 1-2 | 3 | 3 |
| 3-6 | 7 | 7 |
| далее | 10 | 10 |

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)

Цель фонирования. При фонировании области почек значительно уменьшаются отечность, нормализуется самочувствие, улучшается микроциркуляция в дистальных отделах конечностей, существенно уменьшается количество влажных хрипов в легких. Достоверно снижается систолическое и диастолическое давление (при гипотонии давление либо не меняется, либо несколько увеличивается), снижаются застойные изменения в легких, снижается частота сердечных сокращений. Значительно возрастает толерантность к физической нагрузке, что указывает на снижение функционального класса сердечной недостаточности.

Методика. Фонирование проводят по методике фонирования при АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (ГИПЕРТОНИИ) (**схема 5**).

Продолжительность курса. Процедуры проводят до нормализации самочувствия: уменьшение отеков, улучшения цвета кожных покровов, нормализации давления, улучшение реакции артериального давления на физическую нагрузку.

Дисциркуляторная энцефалопатия (Хроническая ишемия мозга)

Цель фонирования. Увеличение кровотока и венозного оттока в шейном отделе позвоночника, улучшение работы сердца (миокарда левого желудочка), снижение степени анизорефлексии (неодинаковости интенсивности сухожильных и (или) кожных рефлексов на конечностях слева и справа). В результате фонирования **повышается качество жизни**: улучшается настроение, восстанавливаются когнитивные способности (память, внимание, умственная трудоспособность), увеличивается объем и скорость движений в конечностях. Регрессируют паркинсонические расстройства: оживает мимика, нормализуется акт ходьбы, прекращаются немотивированные падения, снижается частота эпизодов пошатывания. Значительно улучшается координация: исчезают мимопадание, промахивание, повышается устойчивость в позе Ромберга.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 45**.

Продолжительность курса. Как правило, через 2 недели состояние значительно улучшается. При тяжелой степени расстройства может потребоваться больше времени.

Схема 45. Фонирувание при дисциркуляторной энцефалопатии.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | |
|-------|--|----|
| | Режим 1 | |
| | D1 | D2 |
| 1 | 3 | 3 |
| далее | 5 | 5 |

ПРОСТУДА, ОРЗ, АНГИНА, БРОНХИТ

Общие положения

Простуда – бытовое название заболевания дыхательных путей, спровоцированное охлаждением и сопровождающееся насморком или кашлем.

Дыхательные пути - это единственный открытый путь в стерильную внутреннюю среду организма - альвеолы. Для защиты от проникновения инфекции и пыли во время дыхания слизистые пазухи носа, носоглотки и бронхов выделяют слизь, которая задерживает пыль и другие микрочастицы, с которыми и попадает внутрь организма инфекция. Если слизистые дыхательных путей не справляются с защитной функцией, то тогда и начинается заболевание носоглотки (насморк, ангина) или бронхов (бронхит).

Цель фонирувания - повысить защитную функцию слизистых оболочек дыхательных путей. Поскольку болезнь начинается, когда загрязнение слизистых уже произошло, то перед фонируванием по возможности максимально очищают доступные части слизистых от скопления загрязненной мокроты. Так при рините (насморке) с помощью ватных палочек, смоченных в теплой кипяченой воде, очищают наружные пазухи носа. Вату на палочках смачивают до легкого набухания и счищают с доступных стенок пазух носа все скопления. Прочищают три раза подряд, каждый раз меняя палочку. При гайморите делают проколы (выполняет врач), а для очистки бронхов выполняют упражнения с наклонами туловища и дыхательные упражнения: плавный вдох, резкий выдох. Для улучшения откашливания мокроты фонируют мышцы грудной клетки и диафрагмы. Часть загрязнений и погибших клеток, обычно попадает в лимфатическую систему, где частично проходит их детоксикация, а окончательная переработка осуществляется печенью. Фонирувание **области печени (М)** улучшает ее функцию по детоксикации, фонирувание грудной клетки улучшает

лимфодренаж. Фоноирование слизистых дыхательных путей улучшает их защитную функцию. Фоноируют также **область почек (К)** для улучшения очистки крови и шейный отдел позвоночника для улучшения управления внутренней средой организма.

Методика. Фоноирование проводят по **схемам 46-49** (гайморит ринит, тонзиллит, бронхит).

Продолжительность курса. Процедуры проводят до исчезновения симптомов и еще одну неделю, для закрепления эффекта. Такой подход позволяет сократить заболеваемость ОРЗ более чем в три раза.

Бронхит

Методика. Фоноирование проводят по **схеме 46** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**.

Возможность обострения. На 2-3-й день фоноирования обычно усиливается кашель, который постепенно затихает на 10-14-й день. Фоноирование не прекращают.

Продолжительность курса. Фоноирование продолжают до полного выздоровления, которое обычно начинается после восстановления эффективного кашля и отхаркивания большого количества мокроты.

При хроническом бронхите 2-3 раза в год проводят курс в 30 дней в стадии ремиссии (в отсутствии обострения).

Схема 46. Фоноирование при бронхите.

| День | Режим, области и время фоноирования (мин) | | | | |
|-------|---|----|------|------|---------|
| | Режим 2 | | | | Режим 1 |
| | К | С* | М4** | F*** | Е1 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7-11 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| далее | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |

* С – рис. 8 на центральном вкладыше методик.

* М4 – рис. 3 на обложке методик.

*** F – рис. 9 на центральном вкладыше методик.

Гайморит

Методика. Фоноирование проводят по **схеме 47**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Рекомендуется процедуры проводить перед сном и сразу после пробуждения. Первые несколько суток желательно одну процедуру проводить ночью.

При остром гайморите перед фоноированием гайморовы пазухи обязательно очищают от гноя (процедуру выполняет врач). Непосредственно перед процедурой фоноирования желательно очистить наружные пазухи носа (см. общий раздел).

Продолжительность курса. Процедуры проводят до полного выздоровления, которое, как правило, наступает к 28 дню при условии соблюдения всех рекомендаций. При недостаточности эффекта к 28 дню фоноирование продолжают 3 раза в день еще одну неделю. При хроническом гайморите, даже когда нет обострения, профилактически 2-3 раза в год проводят курс в 28 дней.

Схема 47. Фоноирование при гайморите.

| День | Режим, области и время фоноирования (мин) | | | | |
|-------|---|---------|----|----|--------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | |
| | К | М | G* | D1 | НКЛУ** |
| 1-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3-6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7-10 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 11-14 | 20 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 15-18 | 24 | 7 | 14 | 3 | 3 |
| 19-28 | 30 | 7 | 20 | 3 | 3 |

* **G** – рис. 2 на обложке методик. Если процедуры проводятся ребенку, у которого увеличены носоглоточные миндалины (аденоиды), то область G ему не фоноируют.

** **НКЛУ** – надключичные лимфатические узлы у основания шеи (см. рис. справа).



Ринит (насморк)

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 48**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. В первые несколько суток одну процедуру желательно проводить в середине ночи. В процессе фони́рования могут временно (на 1-3 дня) усилиться выделения из носа. При аллергическом рините необходимо проконсультироваться с врачом и применять методику фони́рования при аллергии.

Продолжительность курса – 2 недели. При недостаточности эффекта к 14 дню фони́рование продолжают 3 раза в день еще одну неделю.

Схема 48. Фони́рование при насморке.

| День | Режим, области и время фони́рования (мин) | | | |
|------|---|----------|-----------|-----------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | М | G* | D1 |
| 1-2 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 3-8 | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 9-14 | 20 | 7 | 10 | 3 |

* **G** - рис. 2 на обложке методик. Если процедуры проводятся ребенку, у которого увеличены носоглоточные миндалины (аденоиды), то область G ему не фони́руют.

Тонзиллит (ангина)

Методика. Фони́рование проводят по **схемам 49 и 50** при температуре тела не выше 37.5 °С. Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки**.

Первые 5 дней миндалины (область В) фони́руют в режиме 1 (**схема 49**, первые дни), затем – в режиме 2 (**схема 50**, продолжение).

Перед фони́рованием миндалины желательно обработать антисептиком для слизистых оболочек (например, раствором Люголя), при этом стерильную вату наматывают на указательный палец, фиксируют на нем, смачивают антисептиком и аккуратно без усилия счищают налет с миндалин и окружающей части горла. В области миндалин (область В) виброфоны устанавливают симметрично так, чтобы максимально приблизить их к миндалинам.

Продолжительность курса. Процедуры проводят до полного выздоровления, которое, как правило, наступает к 16 дню при условии соблюдения всех рекомендаций. Далее для профилактики рекомендуется выполнять процедуры на максимальном времени

(16-й день схемы 50) 1-2 раза в неделю еще в течение 1 месяца.

При хроническом тонзиллите 2-3 раза в год проводят повторный курс в 16 дней в стадии ремиссии (в отсутствии обострения).

Схема 49. Фони́рование при ангине. Первые дни.

| День | Режим, области и время фони́рования (мин) | | | |
|------|---|---|---------|----|
| | Режим 2 | | Режим 1 | |
| | К | М | В* | D1 |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2-3 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 4-5 | 14 | 6 | 5 | 3 |

Схема 50. Фони́рование при ангине. Продолжение.

| День | Режим, области и время фони́рования (мин) | | | |
|-------|---|----|---------|----|
| | Режим 2 | | Режим 1 | |
| | К | В* | М | D1 |
| 6-7 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| 8-12 | 20 | 8 | 7 | 5 |
| 13-16 | 25 | 10 | 10 | 5 |

* В – рис. 11 на центральном вкладыше методик.

ТРАВМЫ

Переломы конечностей, ключицы, ребер

Цель фонирования. Фонирование проводят для сокращения сроков лечения перелома, для предупреждения осложнений, снятия зуда и отека в зоне фиксирующих повязок, а также для ускорения восстановления подвижности суставов.

Методика. Фонирование проводят **по схеме 51** в положении лежа на спине. Процедуры повторяют **не менее 4 раза в сутки**.

Фонирование области перелома начинают на 2-й день после получения травмы при условии оказания врачебной помощи (устранения смещения, вправления, и т. д.).

В день травмы можно провести фонирование области почек (К). Если в последующие дни после фонирования только области травмы повышается артериальное давление, то перед фонированием области травмы рекомендуется фонировать почки (К), как указано в **схеме 51**.

Виброфоны устанавливают непосредственно на область перелома, а также на здоровые части выше и ниже места перелома. При наличии гипсовых повязок виброфоны устанавливают прямо на гипс над местом перелома, а также по краям гипса непосредственно на тело.

Фонирование переломов конечностей может применяться при наличии металлических конструкций, применяемых для внутренней фиксации костей, а также при установленном аппарате Илизарова. При этом не рекомендуется прикреплять виброфоны непосредственно к конструкции аппарата Илизарова. Виброфоны следует устанавливать на мягкие ткани или на гипсовую повязку.

После снятия фиксирующих конструкций для восстановления и увеличения подвижности суставов фонирование продолжают по **схеме 51**, но вместо области перелома фонировать непосредственно область сустава. Виброфоны устанавливают на сустав рядом друг с другом, как указано на рис. 4-5 центрального вкладыша методик. Область сустава фонировать в **режиме 4**. По возможности во время процедуры выполняем упражнение на увеличение подвижности – с наибольшим усилием медленно сгибают сустав в течение 20-30 секунд, а затем также медленно разгибают. Упражнение выполняют в течение половины процедуры.

Продолжительность курса. Фонирование области травмы проводят до полного заживления, затем продолжают фонирование области сустава до восстановления его нормальной подвижности.

Схема 51. Фонирувание при переломе конечностей, ключиц, ребер.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | |
|-------|--|--|----------------------------|
| | Режим 2/ Режим 4 | | |
| | К | Слева и справа от места перелома или над ним | Выше и ниже места перелома |
| 1 | 10 | - | - |
| 2-3 | 16 | 8 | 8 |
| далее | 30 | 15 | 15 |

Компрессионный перелом позвоночника

Цель фонирувания. Фонирувание проводят для сокращения сроков лечения перелома, уменьшения отека, ускорения заживления и профилактики осложнений.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 52**. Процедуры повторяют **4 раза в сутки каждые 6 часов**.

Виброфоны устанавливают симметрично по обе стороны позвоночника вплотную к травмированным позвонкам, также фонируют области выше и ниже места перелома так, **чтобы в область воздействия попали и здоровые позвонки**, расположенные рядом с травмированными.

В случае усиления боли время фонирувания области перелома необходимо сократить так, чтобы боль уменьшилась до приемлемой переносимости. Количество процедур в сутки при этом желательно не сокращать.

Продолжительность курса. Фонирувание проводят до восстановления позвоночника и еще 2 недели. После также желательно выполнить **программу ОРПО** (стр. 10).

Схема 52. Фонирувание при компрессионном переломе позвоночника.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | |
| | К | Слева и справа от места перелома | Выше и ниже места перелома |
| 1-2 | 7 | - | - |
| 3-5 | 14 | 7 | 7 |
| далее | 20 | 10 | 10 |

Рана, послеоперационный шов

Цель фони́рования – сокращение сроков заживления, уменьшение риска образования рубцов.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 53**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Воздействие на **область почек (К)** и **печени (М)** проводят при лечении послеоперационных швов и при большой раневой поверхности. При небольших ранах воздействие на эти области не обязательно, но полезно для целей ОРПО (стр. 10). Очищенные края раны обрабатывают антисептиком. Виброфоны устанавливают через стерильную салфетку.

Продолжительность курса. Фонирование желательно проводить до полного восстановления.

Схема 53. Фонирование для заживления ран и послеоперационных швов.

| День | Режим, области и время фони́рования (мин) | | | |
|-------|---|---------|-------------|-------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | М | 1 край раны | 2 край раны |
| 1 | 10 | 10 | - | - |
| 2-4 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| далее | 25 | 15 | 15 | 15 |

Ожог

Цель фони́рования. Фонирование способствует снятию отека, воспаления, сокращает сроки заживления и уменьшает риск развития осложнений.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 54**. Процедуры повторяют **2-4 раза в сутки каждые 6 часов**. Воздействие на **область почек (К)** и **печени (М)** проводят при большой площади ожога.

При лечении ожогов 2-4 степени аппарат применяют после проведения хирургической обработки обожженной поверхности, осуществляемой в соответствии с фазой раневого процесса.

В области ожога виброфоны устанавливают на неповрежденные участки кожи по краям пораженной области. Виброфоны по краям ожога устанавливают вплотную друг к другу. В зависимости от площади ожога количество установок виброфонов по краям пораженного участка будет разное.

При ожогах на кистях рук фони́рование осуществляют с

противоположной от ожога стороны кисти.

Продолжительность курса. Фонирувание желательно проводить до полного восстановления ткани в травмированной области.

Схема 54. Фонирувание при ожогах.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | |
|-------|--|----|------------------------------|
| | Режим 2 | | Режим 1 |
| | К | М | На каждый участок края ожога |
| 1 | 11 | 5 | По 2 мин. |
| 2 | 15 | 6 | По 3 мин. |
| 3-6 | 23 | 8 | По 5 мин. |
| далее | 25 | 10 | По 5 мин. |

Обморожение

Цель фонирувания. Фонирувание восстанавливает кровоснабжение, уменьшает воспаление после согревания в области обморожения.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 55**. Процедуры повторяют **3-4 раза в сутки**. Виброфоны устанавливают на здоровые ткани рядом с областью обморожения.

Продолжительность курса. Фонирувание желательно проводить до полного восстановления ткани в травмированной области.

Схема 55. Фонирувание при обморожениях

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | |
|-------|--|---------------------|
| | Режим 2 | |
| | К | Область обморожения |
| 1 | 10 | 10 |
| 2-4 | 16 | 16 |
| далее | 20 | 20 |

Ушиб, гематома

Цель фонирования. Фонирование сокращает сроки заживления и уменьшает риск развития осложнений.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 56**. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки, а при давних гематомах – 3-4 раза в сутки**. Виброфоны устанавливают прямо на область травмы.

ВНИМАНИЕ! При гематоме в области головы и вблизи внутренних органов процедуры проводят только в режиме 1. При большой отечности и давних гематомах применяют режим 4, в остальных случаях – режим 2.

Продолжительность курса. Фонирование продолжают до полного выздоровления. Небольшой отек, ушиб проходит за 1-2 процедуры.

Схема 56. Фонирование при ушибах и гематомах.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|-------|--|---------|
| | Режим 1, 2, 4 | Режим 2 |
| | Область травмы | К |
| 1 | 10 | 10 |
| 2-4 | 16 | 16 |
| далее | 20 | 20 |

Растяжение, вывих

Цель фонирования. Фонирование сокращает сроки восстановления связочного аппарата сустава и уменьшает риск развития осложнений.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 57** в положении лежа на спине. Один виброфон устанавливают на область травмы (отека) в наиболее ровном месте, второй – на 7-10 см выше первого. Конечность располагают таким образом, чтобы она была выше уровня сердца. Процедуры повторяют **2-3 раза в сутки**. Первую процедуру начинают не ранее, чем через 4 часа после получения травмы при условии вправления вывиха и иммобилизации сустава (при необходимости).

Продолжительность курса. Фонирование продолжают до полного выздоровления (восстановление прежней подвижности и гибкости). После выздоровления рекомендуется выполнить программу ОРПО (стр. 10 методик).

Схема 57. Фонирувание при вывихах и растяжениях.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) |
|-------|--|
| | Режим 4 |
| | Область травмы |
| 1 | 10 |
| 2-5 | 16 |
| 6-9 | 24 |
| далее | 30 |

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ**Глаукома**

Цель фонирувания. Фонирувание способствует восстановлению оттока внутриглазной жидкости, улучшает питание мышц глаз, зрительного нерва и сетчатки. Регулярное фонирувание позволяет:

- улучшить кровоснабжение глаза и улучшить зрение;
- поддерживать внутриглазное давление в пределах нормы или близким к норме;
- повысить эффективность действия лекарственных препаратов;
- замедлить деградацию структур глаз;
- улучшить самочувствие.

Фонирувание обычно применяется, когда лекарственные средства не дают достаточного эффекта, или же когда внутриглазное давление нормализовано, а зрительные функции (в первую очередь – поле зрения), несмотря на проводимую лекарственную терапию, продолжают ухудшаться.

ВНИМАНИЕ! Фонирувание не проводят, если собственный хрусталик был заменен на искусственный.

Методика. Фонирувание проводится по **схеме 58** и может сочетаться с местной гипотензивной терапией (закапывание капель). Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки**. Перед применением схемы 57 рекомендуется пройти 1-2 недели курс ОРПО (стр. 10 методик). При наличии других заболеваний глаз (помимо глаукомы) необходимо проконсультироваться с врачом.

Особенности установки виброфонов в области глаз указаны на рис. 10 центрального вкладыша методик.

Продолжительность курса – 3 месяца. Далее проводят поддерживающие процедуры – 1, 2 процедуры в неделю, а также после повышенных нагрузок на глаза по схеме, указанной в строке «далее». Повторный курс – через 6 месяцев.

Схема 58. Фонирирование при глаукоме.

| День | Режим, области и время фонирирования (мин) | | | |
|-------|--|-------------------|--------------------|----------|
| | Режим 1 | | | |
| | D1 | Левый глаз | Правый глаз | M |
| 1-2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3-6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7-10 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 11-14 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| далее | 5 | 5 | 5 | 7 |

СТОМАТОЛОГИЯ

Профилактика здоровья зубов

Цель процедур – профилактика атрофии альвеолярного отростка.

Альвеолярный отросток – это участок кости верхней и нижней челюстей, где в специальных лунках располагаются корни зубов.

Потеря альвеолярной кости может существенно повлиять на качество жизни.

Необратимая атрофия альвеолярной кости очень распространена в результате множества причин, таких как периодонтит, потеря (удаление) зубов, пародонтоз и нарушение прикуса.

Для профилактики, помимо естественной гигиены полости рта, необходимо ежедневно проводить процедуры фони́рования в целях восстановления (поддержания) **количества и качества альвеолярной кости**.

Известно о пользе массажа десен пальцами, после чистки зубов. Эта процедура улучшает циркуляцию крови, лимфоток, тканевый обмен, насыщает ткани кислородом. Регулярные процедуры увеличивают толщину эпителия, который предохраняет десны от проникновения бактерий.

Процедура фони́рования значительно эффективнее массажа пальцами.

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 59**.

Процедуру проводят 1 раз в сутки.

Важно. При проведении процедуры необходимо плотно сомкнуть зубы для того, чтобы микровибрация передавалась через зубной ряд верхней челюсти на зубной ряд нижней челюсти и на нижнюю альвеолярную кость и наоборот, при проведении процедуры на нижней челюсти, микровибрация будет передаваться на верхнюю челюсть.

Схема 59. Процедуры в целях профилактики здоровья зубов.

| День | Режим, области и время фони́рования (мин) | |
|-----------|---|--------------------------|
| | Режим 1 | |
| | Верхняя челюсть Z1 | Нижняя челюсть Z2 |
| ежедневно | 3 | 3 |

Область **Z1, Z2**– рис. 1 обложки

В случае недостаточности эффекта, установите значение **РЕЖИМ 2** вместо **РЕЖИМ 1**

Ортодонтия (брекет-системы, элайнеры)

Цель фонирувания - Значительное уменьшение боли при ортодонтическом перемещении и коррекции зубов с помощью брекет-систем. Повышение комфортности лечения. Выраженный антибактериальный и противовоспалительный эффект, обеспечивающий профилактику пародонтита.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 60**. Процедуру повторяют **1 – 3 раза в сутки**.

В случае недостаточности эффекта, вместо режима 3 устанавливается **РЕЖИМ 4**, а вместо режима 1 - **РЕЖИМ 2**.

Схема 60. Фонирувание после активации брекет-системы.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Режим 3 | | Режим 1 | |
| | Верхняя челюсть Z1 | Нижняя челюсть Z2 | Верхняя челюсть Z1 | Нижняя челюсть Z2 |
| 1 | - | - | 5 | 5 |
| 2 и далее | 3 | 3 | 3 | 3 |

Z1, Z2 – пример установки виброфонов на рис. 1 обложки методик.

Пародонтология (пародонтит, гингивит)

Цель фонирувания - выраженный и быстрый (уже после пяти процедур) противовоспалительный эффект. Устранение дистрофических процессов в области патологического очага в виде восстановления целостности костной ткани альвеолярных отростков. Выраженный антибактериальный эффект.

Методика. Фонирувание проводят по **схеме 61**. Процедуры повторяют **1 – 3 раз в сутки**. В случае недостаточности эффекта, вместо режима 1 устанавливается **РЕЖИМ 2**.

Схема 61. Фонирувание при пародонтите и гингивите.

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | |
|-----------|--|-----------------------------|
| | Режим 1 | |
| | Верхняя челюсть Z1 | Нижняя челюсть Z2 |
| 1 | 5 | 5 |
| 2 и далее | 10 | 10 |

Z1, Z2 – пример установки виброфонов на рис. 1 обложки методик

Зубная боль

Цель фонирования – уменьшить и снять боль. Фонирование не отменяет устранение причины боли (например, кариес), поэтому необходимо обратиться к стоматологу.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 62**. Процедуры повторяют **3-4 раза в сутки**. Время фонирования области зуба увеличивают постепенно (как указано в схеме), так как при резком увеличении дозы фонирования можно вызвать обострение реакции и усиление боли.

Схема 62. Фонирование при зубной боли.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|------|--|--------------|
| | Режим 1 | |
| | Область В/В1* | Область зуба |
| 1 | 3 | 3 |
| 2-4 | 4 | 4 |
| 5-7 | 5 | 5 |

* **Область В/В1** – виброфоны устанавливают **со стороны больного зуба**, как показано на рис. 11 центрального вкладыш методик): один – на область лимфоузла (В), второй – у основания челюсти (В1).

ЗАБОЛЕВАНИЯ УШЕЙ

Отит. Воспаление уха

Цель фонирования – оказать противоотечное, обезболивающее, противовоспалительное действие.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 63**. В больное ухо закапывают 2-3 капли борного спирта или иного противовоспалительного средства. Закапывание выполняют лежа на том боку, где находится здоровое ухо. Через 3-5 минут, не меняя положения (на боку), фонировать область А/А1. Процедуру повторяют **2-3 раза в сутки**. Если отит сопровождается признаками ОРВИ, простуды, а также наблюдается частая заболеваемость отитом, то дополнительно проводится **2 раза в сутки** фонирование по **схеме 64**.

Фонирование желательно начинать при первых симптомах заболевания, а также в целях его профилактики при переохлаждении. При остром воспалении фонирование проводят только в сочетании с противовоспалительными препаратами и под наблюдением врача.

Схема 63. Фонирование при отите.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|------|--|--|
| | Режим 1 | |
| | Область А/А1* | |
| 1 | 5 | |
| 2-4 | 7 | |
| 5-7 | 10 | |

* **А/А1** - один виброфон устанавливают на область А (рядом с козелком уха), другой – на А1 (сосцевидный отросток за ухом), рис. 11 на центральном вкладыше методик.

Схема 64. Дополнительная схема фонирования при отите.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | |
|------|--|----|---------|----|
| | Режим 2 | | Режим 1 | |
| | К | М | Д1 | Д2 |
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 |
| 6-7 | 20 | 10 | 5 | 5 |

Нейросенсорная тугоухость

Цель фонирования – улучшить кровоснабжение слуховых рецепторов, восстановить слуховую функцию.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 65**. Процедуры повторяют **1-2 раза в сутки**.

При односторонней тугоухости виброфоны устанавливают на А/А1 со стороны больного уха; при двусторонней тугоухости – воздействуют поочередно на левое и правое ухо. Воздействие на области А/А1 проводят в положении сидя, на области D1, D2 – лежа на спине. Фонирование хорошо сочетается с медикаментозной терапией, назначаемой лечащим врачом.

Продолжительность курса – 3 месяца и более до тех пор, пока происходят улучшения. Далее профилактически по 1 месяцу 1-3 раза в год.

Схема 65. Фонирование при нейросенсорной тугоухости.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | |
|-------|--|----|-------|
| | Режим 1 | | |
| | D1 | D2 | A/A1* |
| 1-2 | 2 | 2 | - |
| 3-6 | 2 | 2 | 3 |
| 7-10 | 4 | 4 | 7 |
| далее | 4 | 4 | 10 |

* **A/A1** - область А (рядом с козелком уха) и А1 (сосцевидный отросток за ухом) изображены на рис. 11 на центральном вкладыше методик.

АЛЛЕРГИЯ

Цель фонирования: улучшение функции печени и регенеративных процессов.

Методика. Фонирование проводят по **схемам 66, 67** в зависимости от возраста. Процедуры повторяют **1-3 раза в сутки**.

Продолжительность курса – 3 месяца. Курс при необходимости повторяют после перерыва в 5 дней. Далее в целях профилактики проводят курс в 1 месяц 1-3 раза в год (перед началом периода аллергических обострений).

Схема 66. Фонирование при аллергии у взрослых и детей старше 10 лет.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | |
|-------|--|----------|-----------|------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | М | М5 | Е40 |
| 1-2 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 3-6 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 7-10 | 21 | 7 | 7 | 7 |
| 11-14 | 27 | 9 | 9 | 9 |
| далее | 30 | 10 | 10 | 10 |

Схема 67. Фонирование при аллергии у детей до 10 лет.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | |
|-------|--|----------|------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | |
| | К | М | Е40 |
| 1-2 | 6 | 3 | 3 |
| 3-6 | 10 | 5 | 5 |
| 7-10 | 14 | 7 | 5 |
| 11-14 | 18 | 9 | 9 |
| далее | 20 | 10 | 10 |

ИШИАС

Цель фонирования – снятие воспаления в области седалищного нерва, восстановление иннервации.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 68** (часть 1 и часть 2). Процедуры проводят **2 раза в сутки**. В каждую процедуру необходимо выполнить обе части схемы.

Схема 68. Фонирование при ишиасе. Часть 1.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | |
|-------|--|---------|---------|-----|----|------|
| | Режим 2 | | Режим 1 | | | |
| | К | Сустав* | Е3 | Е31 | Е4 | ПЛУ* |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2-5 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6-10 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| далее | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

* **Сустав** – виброфоны устанавливаются в области тазобедренного сустава, как показано на рис. 5 на центральном вкладыше.

** **ПЛУ** – паховые лимфатические узлы той ноги, где защемлен седалищный нерв. Виброфоны устанавливают, как показано на рис. 3 на обложке методик.

Схема 68. Фонирование при ишиасе. Часть 2.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | |
|-------|--|-------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 |
| | область боли по ходу седалищного нерва* | область ягодичных мышц* |
| 1 | 2 | 2 |
| 2-5 | 6 | 6 |
| 6-10 | 8 | 8 |
| далее | 10 | 10 |

* Пример установки виброфонов показан на стр. 66.



ЛИМФОСТАЗ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Методика. Фони́рование проводят по **схеме 69**. Воздействие проводят на область К, паховые лимфатические узлы и область Е31. Положение – лежа на спине, под голени подкладывают подушку.

Фони́рование проводят 1 раз в сутки перед сном. После процедуры до утра рекомендуется не вставать. Во время сна голени должны быть приподняты на уровень чуть выше сердца

Продолжительность курса. Курс лечения – 14 дней. Перерыв между курсами – 1-3 недели.

Схема 69. Фони́рование при лимфостазе нижних конечностей.

| День | Режим, области и время фони́рования (мин) | | | |
|-------|---|-----------------|----------------|-----|
| | Режим 2 | Режим 1 | | |
| | К | ПЛУ правой ноги | ПЛУ левой ноги | Е31 |
| 1-3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 4-6 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 7-10 | 24 | 9 | 9 | 6 |
| далее | 30 | 12 | 12 | 6 |

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Цель фонирования. Улучшение показателей электровозбудимости мышц, снижение мышечного тонуса в конечностях, повышение тургора тканей.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 70**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки**. Положение лежа на спине.

Продолжительность курса. Определяется клиническим течением заболевания.

Схема 70. Фонирование при последствиях детского церебрального паралича.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | | | |
|-------|--|----|-----|----|----|----|---------|-------------------------------|
| | Режим 1 | | | | | | Режим 2 | |
| | D1 | D2 | E11 | E2 | E3 | E4 | К | область контрагированных мышц |
| 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 3-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 7-10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| 11-14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| далее | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 |

ПРОЛЕЖНИ

Цель фони́рования – повысить общий мышечный тонус, сниженный из-за длительного лежания, улучшить местный кровоток и лимфоток. Чем раньше начата профилактика пролежней у лежачих больных, тем выше результативность. Фони́рование применяется при пролежнях с 1 по 4 степень. При 5 степени фони́рование малоперспективно.

Методика. Фони́рование проводится по **схеме 71**. Процедуры повторяют каждые 4 часа в течение суток.

Продолжительность курса. Фони́рование проводят до выздоровления, или пока продолжают улучшения. Далее профилактически 1-2 раза день, 5 -7 дней в неделю.

Схема 71. Фони́рование при пролежнях со стороны спины.

| День | Режим, области и время фони́рования (мин) | |
|-------|---|--------------------|
| | Режим 2 | |
| | К | Область пролежней* |
| 1 | 5 | 5 |
| 2-4 | 8 | 8 |
| далее | 10 | 10 |

*Виброфоны устанавливают на здоровые участки тела рядом с образовавшимися пролежнями, а в целях профилактики – в местах возможного образования пролежней. Рекомендуется устанавливать виброфоны по 2 на каждую область.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Цель фонирования. Воздействие оказывается на все органы, которые участвуют в регуляции сахара в крови (надпочечники, печень, поджелудочная железа), а также на шейный и грудной отделы позвоночника для восстановления проводимости нервных путей (если она нарушена). Фонирование используется в качестве вспомогательного средства в комплексном лечении.

Методика. Фонирование проводят по **схеме 72**. Процедуры повторяют **2 раза в сутки**. Необходимо соблюдать диету. Необходимо следить за сахаром в крови, в частности: натощак, до процедуры, после процедуры, на ночь. Следить за выделениями сахара в моче. Эти меры позволят избежать гипогликемического состояния. Дозу инсулина можно постепенно снижать при соблюдении диеты. В целях профилактики и лечения диабетической ангиопатии нижних конечностей **схему 72 дополняют схемой 73**.

Весь процесс лечения должен проходить под контролем врача-терапевта и эндокринолога.

Продолжительность курса – от 3 месяцев и более до тех пор, пока происходят улучшения. Далее проводят поддерживающие процедуры 1-2 раза в сутки 5-7 дней в неделю.

Схема 72. Фонирование при сахарном диабете.

| День | Режим, области и время фонирования (мин) | | | | | | |
|-------|--|-----|---------|----|-----|----|----|
| | Режим 2 | | Режим 1 | | | | |
| | К | М9* | М | Е2 | Е11 | Д1 | Д2 |
| 1-2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3-6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7-10 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 11-14 | 30 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| далее | 35 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |

***М9** – проекция поджелудочной железы на живот, рис. 7 на центральном вкладыше. Эту область лучше дополнительно к схеме фонировать **по 5 минут в первые 30 минут после каждого приема пищи**.

Схема 73. Дополнительная схема для лечения и профилактики диабетической ангиопатии ног (диабетической стопы).

| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | |
|-------|--|----|---------|
| | Режим 2 | | Режим 1 |
| | Рядом с пораженной областью стопы* | Е4 | ПЛУ** |
| 1-3 | 10 | 2 | 2 |
| 4-6 | 12 | 6 | 6 |
| далее | 16 | 6 | 10 |

*Непосредственно область поражения стопы не фонируют. Виброфоны устанавливают на расстоянии 1-2 см от края пораженной области. По мере уменьшения зоны поражения приближают установку виброфонов.

**ПЛУ – паховые лимфатические узлы той ноги, у которой поражена стопа. Виброфоны устанавливают, как показано на рис. 3 обложки методик.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ

Цель фонирования. Фонирование области печени (F правая/M4 правая) увеличивает интенсивность иммунных реакций, что приводит у больных гепатитом В и С к многократному увеличению интерферона в крови. Практический результат от процедур фонирования не уступает лекарственной терапии интерфероновыми препаратами: примерно 40% полных ремиссий (ПЦР минус, АЛТ – норма) только за один курс фонирования (6-12 месяцев). Благодаря воздействию на область почек (К) и грудной отдел позвоночника фонирование переносится хорошо с улучшением самочувствия.

Дополнительные противопоказания. Фонирование по схеме 74 для хронического гепатита не проводится в следующих случаях:

- если уровень активности АЛТ (аланинаминотрансферазы) превышает норму более чем в 5 раз;
- возраст менее 16 лет;
- имеется декомпенсированный цирроз печени;
- имеются тяжелые сопутствующие болезни (состояние после инсульта или инфаркта миокарда, наличие кардиостимуляторов);
- хронический алкоголизм;
- наркозависимость.

Общие и частные противопоказания изложены также на стр. 2- 3 методик фонирования.

Методика. Фонирование проводят по схеме 74. Фонирование области печени (F правая/M4 правая) проводится 1 раз в неделю и 1 раз в сутки (!). В этот день воздействие на другие области не осуществляется. В остальные 6 дней недели воздействие оказывается на области К, М, Е11, Е2, Е21 для накопления общих ресурсов организма и процедуры повторяют 2 раза в сутки.

Продолжительность курса. Курс можно повторять несколько раз подряд до достижения ремиссии.

Схема 74. Фонирувание при гепатите В и С.



| День | Режим, области и время фонирувания (мин) | | | | | |
|-----------------|--|---------|-----|----|-----|-------------------------|
| | Режим 2 | Режим 1 | | | | Режим 2 |
| | К | М | Е11 | Е2 | Е21 | Ф правая/ М4 правая* |
| 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
| 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | - |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | - |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 | - |
| 7 | - | - | - | - | - | 5 |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | - |
| 9 | 21 | 9 | 4 | 4 | 4 | - |
| 10 | 23 | 10 | 5 | 4 | 4 | - |
| 11 | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 | - |
| 12 | 27 | 12 | 5 | 5 | 5 | - |
| 13 | 28 | 13 | 5 | 5 | 5 | - |
| 14 | - | - | - | - | - | 7 |
| 15 | 28 | 13 | 5 | 5 | 5 | - |
| 16 | 29 | 14 | 5 | 5 | 5 | - |
| 17-20 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
| 21 | - | - | - | - | - | 13 |
| 22-27 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
| 28 | - | - | - | - | - | 15 |
| 29-34 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
| 1 день в неделю | - | - | - | - | - | 15 |
| 6 дней в неделю | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | - |

* **Область F (правая)** - область печени со стороны спины, рис. 9 на центральном вкладыше методик.

Область М4 (правая) - рис. 3 на обложке методик.


Рис. 12. Области воздействия E40. Виброфоны смещают от процедуры к процедуре на ширину ладони (L) вверх и вниз.

Процедуры 1, 4, 7...
Базовое положение

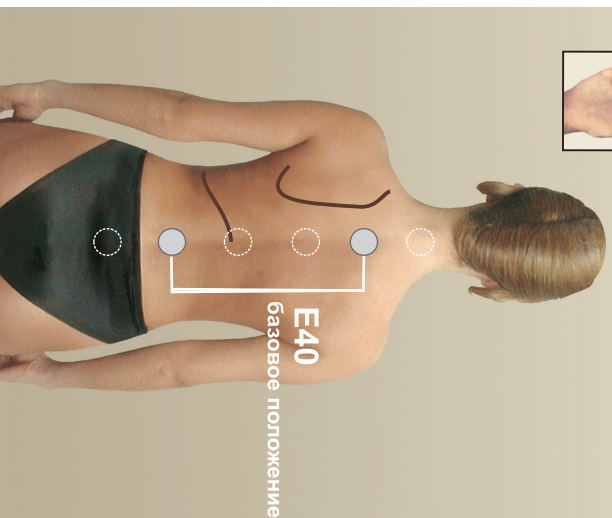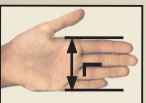


Процедуры 2, 5, 8...

Виброфоны смещаются на ширину ладони (L) вверх от базового

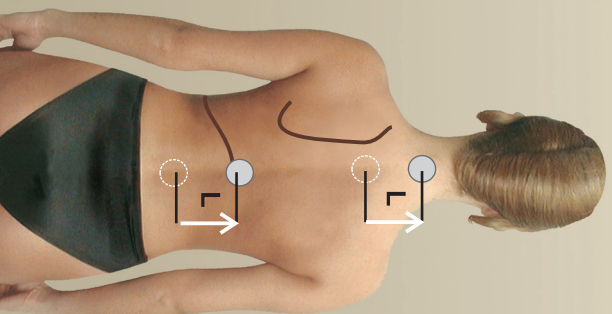

Процедуры 3, 6, 9...

Виброфоны смещаются на ширину ладони (L) вниз от базового

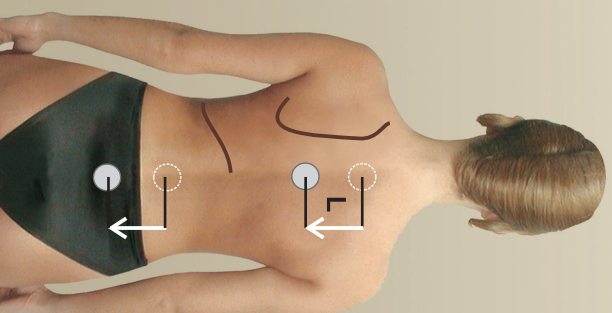

*Ресурсный подход к здоровью —
ключ к улучшению качества жизни,
доступный каждому*

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес электронной почты:
info@vitafon.ru

Телефоны для справок:
8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный)

Мессенджер:
Telegram 8 931 107-20-12

Сайты в интернете:
www.vitafon.ru
www.vitafon-market.ru

Адрес предприятия-изготовителя:
198097, Россия, Санкт-Петербург,
Огородный пер., д. 23

Адрес для почтовых отправлений (ремонт):
198096, Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 28,
ООО «Витафон»