

Инструкция по использованию подкладного медицинского круга «Альпина Пласт»

Круг медицинский подкладной «Альпина Пласт» предназначен для лечения и профилактики пролежней, стимуляции и релаксации мышечных тканей, улучшения кровообращения.

Показания:

- при уходе за больными со склонностью или с уже образовавшимися пролежнями;
- ослабление нагрузки после операций на прямой кишке, ушибе копчика;
- ослабление нагрузки на промежность при геморрое;
- ослабление нагрузки при состоянии после эпизиотомии;

Противопоказания: отсутствуют.

Основные параметры и характеристики: диаметр изделия 390±5 мм, выдерживает нагрузку не менее 150 кг.

Круг подкладной надуйте ртом, предварительно протерев клапан спиртом. Закройте воздушный клапан и вдавите его внутрь круга. Круг подкладной должен быть упругим, но не жестким.

Перед применением проведите дезинфекцию изделия методом погружения в 3% раствор хлорамина в течение 60 минут (МУ 287-113) с последующим промыванием проточной питьевой водой и просушиванием. При использовании изделия одним пациентом дезинфекцию проводят протираанием изделия ветошью, смоченной 0,5 - 3 % раствором хлорамина с последующим промыванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Круг подкладной помещают под участок тела, испытывающий нагрузку. При использовании для тяжелобольных: повернув больного на бок, подкладной круг помещают под простыней (или пеленкой) так, чтобы подвергающийся давлению участок кожи (обычно крестец) находился над отверстием круга.

После применения изделие промыть горячей водой и просушить.

Условия хранения: в помещении при температуре от + 5 до + 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Изделие, у которого во время гарантийного срока будет обнаружена функциональная неисправность, безвозмездно заменяется годным аналогичным изделием за счет завода-изготовителя.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Утилизация: вместе с бытовым мусором.

Круг подкладной соответствует требованиям ТУ 9398-018-17707123-2013

Регистрационное удостоверение №РЗН 2015/2669 от 15.05.2015

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.