

# ООО «МЕДПОЛИМЕРТОРГ»

Инструкция по эксплуатации .

## **Поильник полимерный**

**Описание :** Поильник изготовлен из полипропилена.

Поильник представляет собой неразборное пластмассовое изделие с двумя ручками по бокам и носиком через которое производится прием пищи.

### **Применение:**

Поильник предназначен для приема напитков, и жидкой пищи через носик.

При приеме жидкости (пищи) две ручки расположенные по бокам позволяют крепко и удобно удерживать изделие в руках. Перегородка, расположенная в верхней части изделия, предотвращает поливание жидкости в наклонном состоянии . После использования дезинфицировать одним из указанных ниже способом.

### **Обработка и дезинфекция :**

Все новые изделия следуют несколько раз помыть водопроводной водой тем. 50\*-60\*С. Для дезинфекции использовать средства на водной основе, Разрешенные для стерилизации и дезинфекции пластмассовых изделий или 3% раствором хлорамина , или 3% раствором дихлора , или 1 % раствором сульфохлорантина . Не допуская использование средств, содержащих абразивы.

### **Особые указания:**

**Запрещается проводить стерилизацию в автоклаве!**

**Ограничения в применении :** Не следует использовать поильник у больных с нарушениями акта глотания.