

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

PO-303

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett на коленный сустав с регулятором объема движения, арт. РО-303, обеспечивает жесткую фиксацию коленного сустава в сагиттальной плоскости (уменьшение симптома «переднего выдвигающего ящика») и боковую стабилизацию. Защищает от перерастяжения и чрезмерного сгибания в суставе. Имobilизирует коленный сустав под углами 10, 20, 40 градусов. Задаёт объём движения в диапазоне 10, 20, 40, 60, 90 градусов. Позволяет осуществлять раннюю мобилизацию сустава после оперативных вмешательств и травм. Уменьшает болевой синдром.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- реабилитация после оперативных вмешательств на капсульно-связочном аппарате коленного сустава, реконструктивных операций на менисках с постепенным расширением объема движений;
- повреждения или разрывы одной или обеих крестообразных связок (передней и/или задней, а также боковых связок коленного сустава);
- выраженная и (или) сочетанная хроническая нестабильность связочного аппарата вследствие травм или дегенеративных заболеваний коленного сустава;
- вальгусная или варусная девиация коленного сустава;
- рекурвация коленного сустава;
- консервативное лечение контрактур сустава;
- профилактика травматизма при нагрузках;
- реабилитация после спортивных травм;
- профилактика повторных травм у спортсменов.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

КОНСТРУКЦИЯ

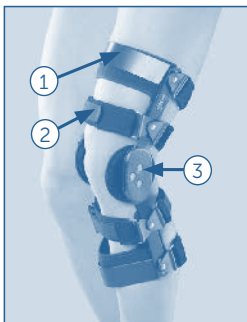


рис. 1.

Ортез Orlett, арт. РО-303, на коленный сустав с полицентрическими шарнирами состоит из следующих элементов (цифры на рисунке соответствуют элементам конструкции):

1. Металлическая рама.
2. Фиксирующие ремни на бедре и на голени.
3. Полицентрические шарниры.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Расстегните все ремни с застежками велкро.
2. Установите на обоих шарнирах необходимый диапазон движения или угол сгибания-разгибания (см. порядок установки необходимого диапазона движения или угла сгибания-разгибания в шарнирах).

3. Расположите раму ортеза так, чтобы центры шарниров находились приблизительно на уровне верхнего края надколенника. При этом ортез окажется несколько выше, чем необходимо, однако при движении он займет правильное положение.
4. Застегните фиксирующие ремни, соблюдая последовательность застегивания ремней, отмеченную маркировкой, нанесенной на передние части ремней-застежек (1-2-3-4-5-6).
5. Затяните все ремни так, чтобы ортез плотно облегал ногу, но при этом не вызывал дискомфорта.
6. Попросите пациента походить в ортезе в течение 10-15 мин, после чего расстегните все ремни и снова застегните их в указанном выше порядке. Это необходимо для предупреждения возникновения отека и сдавления тканей.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать слишком сильно фиксирующие ремни во избежание нарушений кровообращения.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМОГО ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЯ ИЛИ УГЛА СГИБАНИЯ-РАЗГИБАНИЯ

1. Откройте защитную крышку (рис. 2).
2. С помощью четырех стабилизирующих стержней установите необходимый угол фиксации сгибания-разгибания или диапазон движения. Медиальный и латеральный шарниры должны иметь одинаковые установки (рис. 3).
3. Закройте защитную крышку.



рис. 2



рис. 3

ВНИМАНИЕ!

Необходимые углы сгибания-разгибания и диапазон движений выстав-
ляются под контролем лечащего врача.

Самостоятельное и бесконтрольное изменение установок шарни-
ров пациентом недопустимо.

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для подбора ортеза Orlett на коленный сустав с регуляторами объема движения, арт. РО-303, сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедра на уровне 17 см выше середины коленной чашечки.

Согласно полученным данным подобрать ортез по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедра на уровне 17 см выше середины коленной чашечки, см
S	43-48
M	48-53
L	53-58

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Пластиковые части боковых панелей, бедренной гильзы и пластиковый прокладки необходимо протирать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Перед стиркой съемные мягкие детали необходимо отстегнуть. Для мягких деталей предусмотрена только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена.

Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После высыхания мягкие детали пристегнуть к пластиковым частям боковых панелей и бедренной гильзы.



СОСТАВ

15% полиамид, 10% полиэстер, 10% полихлоропрен, 3% полиуретан, 2% хлопок, 50% алюминий, 10% сталь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. РО-303, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01697 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Арт.: INTO16-PO-303-N1_03/17