

Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов с принадлежностями: костыли моделей AMUC01, AMUC02, AMUC03, AMFC11, AMFC12, AMFC13 и принадлежности AMCT83 ко всем указанным моделям; AMFC14 и принадлежности AMCT82 к ним

## ПАСПОРТ

**Производитель:** «Амрус Энтерпрайзис Лтд.» США Amrus Enterprises, Ltd.  
**AMRUS** 720 King Georges Post Road, Suite 305, Fords, New Jersey 08863, USA

**Импортер / Организация, уполномоченная на принятие претензий:**

ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
Россия, 115054, Москва, ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1

**Место производства** Foshan Zubon Technology Co., Ltd., 2/F-1, No.5 Plant,  
Yungang Industrial Zone, Shidong Village, Shilian,  
Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, China

**Регистрационное удостоверение Росздравнадзора**

№ РЗН 2016/4188 от 26.11.2021

**Соответствие:** ГОСТ Р 50444-92 (разд.3, 4) ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010  
ГОСТ Р 51632-2014

**Срок службы:** не менее 2 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к изделиям срок их службы может быть значительно больше указанного. Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию изделий по истечении указанного срока службы обратитесь в сервисный центр.

**Срок гарантии:** на костыли - 12 месяцев  
на опорные резиновые наконечники - 3 месяца


При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии и срок службы исчисляется с даты производства.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие:

- удара, небрежного обращения;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

**С условиями действия гарантии ознакомлен.**

**Претензий к внешнему виду не имею.**

 2022

\_\_\_\_\_  
Дата продажи

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

Адреса сервисных центров в регионах России указаны на сайте [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) в разделе «Сервисные центры».

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу:  
Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5., ЗАО фирма «Москва-Амрос»,

**Дополнительную информацию можно получить по адресу:**

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)

E-mail: [info@mos-amros.ru](mailto:info@mos-amros.ru)

телефон 8 800 250 01 06

**Отметки о ремонте**

Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов с принадлежностями: костыли моделей AMUC01, AMUC02, AMUC03, AMFC11, AMFC12, AMFC13 и принадлежности AMCT83 ко всем указанным моделям; AMFC14 и принадлежности AMCT82 к ним - служат для увеличения устойчивости пользователя при ходьбе и уменьшения нагрузки на ноги за счет ее переноса на верхнюю часть туловища и руки.

Предназначены для пользователей, имеющих повреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата, ослабленных или имеющих нарушения чувства равновесия, с массой тела до 100 кг. Выполнены из алюминиевого сплава.

В моделях AMUC01...03 предусмотрена отдельная регулировка длины костылей с шагом регулировки 2,5 см, и расположения рукоятки костылей - с шагом 3,75 см.

AMUC01 длина костыля от 93 до 113,3 см (под рост пользователя от 130 до 150 см), расстояние от подмышечной опоры до рукоятки от 19,5 до 34,5 см.

AMUC02 длина костыля от 113 до 133,3 см (под рост пользователя 150-180 см), расстояние от подмышечной опоры до рукоятки от 37,0 до 52,0 см.

AMUC03 длина костыля от 133 до 153,3 см (под рост пользователя 180-200 см). расстояние от подмышечной опоры до рукоятки от 42,5 до 57,5 см.

Предусмотрена отдельная регулировка длины нижней и верхней секций костылей моделей AMFC11...13. Шаг регулировки – 2,5 см.

AMFC11 длина нижней секции от 55,0 до 77,0 см.

длина верхней секции от 22,5 до 30,0 см.

AMFC12 длина нижней секции от 72,0 до 95,0 см.

длина верхней секции от 24,0 до 33,5 см.

AMFC13 длина нижней секции от 85,0 до 107,0 см.

длина верхней секции от 24,5 до 32,0 см.

AMFC14 длина нижней секции от 75,0 до 97,0 см.

длина верхней секции 22 см.

В рукоятке модели AMFC14 имеется светоотражающая вставка.

Костыли моделей AMFC11...14 имеют встроенное устройство противоскольжения (УПС).

Принадлежности AMCT82, AMCT83 - опорные резиновые наконечники – сменные, с металлическим вкладышем.

Сохраняйте костыли в чистом и сухом виде. Очистку поверхности рукояток производите теплой водой со слабым раствором моющего средства. Металлические детали очищайте влажной тканью. Не допускайте повреждения декоративных покрытий костылей твердыми и острыми предметами.

