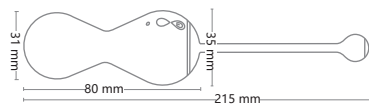
**Комплектация**

Ограничитель    Магнитный USB-кабель    Руководство пользователя    Чехол

**Технические характеристики**

Материал: кремний/ABS | Водонепроницаемость: IPX6 | Аккумулятор: 200 mAh  
 Зарядное напряжение: 5V | Максимальный зарядный ток: 500 mA |  
 Время зарядки: 60 минут | Рабочее время: 180 минут | Вес: 58 г. | Цвет: розовый

US Patent: D760,898 S CN Patent: ZL 2014 1 0751835.0

Производитель: VTrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.  
 Rm 508, 1888 Yishan Rd., Shanghai, China  
 +86 21 64052517  
 vtrump.com

**Первое использование****Шаг 1: скачайте приложение**


1. Найдите приложение Magic Kegel в AppStore или Play Market.
2. Отсканируйте QR-код и скачайте приложение.
3. Зайдите на сайт [smartkegelball.ru](http://smartkegelball.ru) и скачайте на нём приложение.

**Шаг 2: запустите приложение и подключите устройство к смартфону**


Включите свой Kegel Master Gen2.



Следуйте инструкциям в приложении для установления соединения.

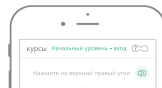

В приложении появится оповещение о соединении, когда тренажёр подключится к смартфону.

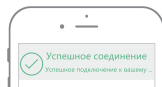**Шаг 3: приступите к занятиям**

Примите комфортное положение для введения тренажёра: лёжа на спине с ногами, согнутыми в коленях, либо стоя с одной ногой, поднятой на 90°, как при введении гигиенического тампона. Светодиодный индикатор при этом должен быть повернут в сторону мочевого пузыря и уретры. Для облегчения введения, возможно, потребуются использовать лубрикант на водной основе. Также можно надеть при необходимости на устройство презерватив и нанести лубрикант на его поверхность.



Подсказка: при установке необходимо оставить шнур-антенну снаружи половых органов минимум на 4 см, чтобы сигнал был хорошим.

**Шаг 4: завершение тренировки**

Для выключения питания прибора нажмите кнопку питания на 3 секунды. Светодиодный индикатор выключится, когда устройство будет полностью отключено. После полного отключения устройства необходимо его очистить и убрать на хранение (см. раздел «Уход и хранение»).



Подсказка: Kegel Master Gen2, выключится самостоятельно через 5 минут после выхода из приложения или отключения тренажёра kegel Master Gen2 от него.

Touch Beyond Your Thought  
 Превосходя Ваши ожидания



Официальный дистрибьютор  
 на территории РФ:

ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА"  
 129110, Москва, Проспект Мира, 68, стр.2  
 +7 (495) 788-77-46  
[pentcroft@mail.ru](mailto:pentcroft@mail.ru)  
[Arabin24.ru](http://Arabin24.ru)  
[Repro21.ru](http://Repro21.ru)  
[Smartkegelball.ru](http://Smartkegelball.ru)



## Гарантийные условия

Гарантия производителя – 1 (один) год после даты приобретения.

Гарантийный срок распространяется на качество сборки и используемые материалы, подвижные части изделия, обеспечивающие нормальную работу устройства.

Гарантия не покрывает случаи естественного износа, поломки ввиду не соблюдения правил эксплуатации (см. раздел “Уход и хранение” ), намеренной порчи устройства.

При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока, обратитесь к продавцу.

Не пытайтесь вскрывать устройство самостоятельно - это аннулирует гарантию.

## Сервисная карточка

### Информация о пользователе

Имя .....

Телефон .....

Адрес .....

Причина возврата .....

### Информация о продавце

Название компании .....

Телефон .....


## Автономный режим тренировки

Тренажёр можно использовать без смартфона: сжатие мышц тазового дна вокруг тренажёра передаёт импульс через датчики давления и тренажёр будет вибрировать, усиливая эффект от сокращения. См. изображение. Сила и продолжительность виброответа тренажёра зависит от силы и длительности его сжатия мышцами тазового дна. Использование тренажёра возможно не только в положении лёжа, но и стоя. Рекомендуется попробовать оба положения тела для тренировки, чтобы определить оптимальный и наиболее эффективный для Вас.



## Зарядка устройства

**Шаг 1:** откройте крышку порта зарядки Kegel Master Gen2 (см. схему на стр. 1) и присоедините магнитный конец кабеля к порту.

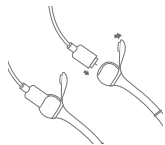

**Шаг 2:** подключите устройство с кабелем к сети через USB адаптер, либо напрямую к ноутбуку, компьютеру или портативному зарядному устройству.



**Шаг 3:** после подключения к источнику питания на тренажёре загорится светодиодный индикатор. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор погаснет. При первом применении сначала полностью разрядите тренажёр до выключения, а после проведите его полную зарядку.



## Выявление неисправностей

Если Ваш Kegel Master Gen2 не работает:

- при работе в автономном режиме, включите тренажёр, нажмите на сенсорные датчики. Если нет виброответа - проверьте заряд аккумулятора;

- при работе через приложение (не удаётся подключить тренажёр к мобильному устройству), проверьте заряд аккумулятора тренажёра и мобильного устройства.

## Уход

Тренажёр необходимо после каждого использования обрабатывать очистителем для силиконовых тренажёров или тёплой водой с средством для интимной гигиены/антибактериального мыла. Перед использованием/хранением устройство необходимо полностью просушить.

## Хранение



Для хранения используйте сумочку-чехол. Хранение без неё может вызвать повреждение тренажёра. Необходимо хранить устройство в прохладном вентилируемом месте, избегая воздействия солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

## Особые указания

Предназначено для лиц старше 18 лет. При возникновении дискомфорта во время тренировки необходимо прекратить использование. Не применять на раздражённой или повреждённой коже. Перед применением снимите пирсинг и иные украшения половых органов. Не продолжать тренировку в случае перегрева или сильного нагрева тренажёра.

# Kegel Master Gen 2

Ваш персональный тренер для эффективных тренировок по Кегелю

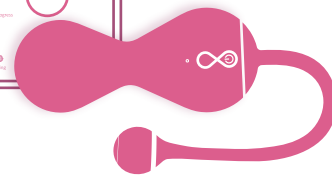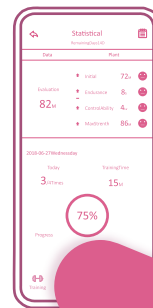

## Руководство пользователя

Arabin24.ru  
Repro21.ru  
Smartkegelball.ru