



Костыли: Костыли подмышечные:
арт.10021, арт.10021/СН, арт.10021/У,
арт.10022, арт.10022-ВА, арт.10022/У,
арт.10023, арт.10023-ВА, арт.10023/У

Принадлежности к костылям:

арт.10050 - Резиновые подмышечные валики 19
см.

арт.10060 - Резиновые валики для кисти 10 см.

арт.10030 – Резиновая насадка для костылей.

арт.10031 – Резиновая насадка для костылей.

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей подмышечных 10021, 10021/СН, 10021/У, 10022, 10022ВА, 10022/У, 10023, 10023ВА, 10023/У. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Предназначен для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.



10021



10022



10023



10030



10031

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	10021, 10021/СН, 10021/У, 10022, 10022/У, 10023, 10023/У
	сталь	10022ВА, 10023ВА
рукоятка	регулируемая по высоте	все модели
валики	мягкие, регулируемые по высоте	все модели
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

1.3 Упаковка

Комплектация: костыль, руководство по эксплуатации

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на костыли 10022ВА и 10023ВА - 25 кг; на оставшиеся модели - 113 кг.

2.2 Порядок работы

1. Костыли продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

Модели 10021/У, 10022/У, 10023/У - со встроенным УПС.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Костыли подмышечные 10021, 10021/СН, 10021/У, 10022, 10022/У, 10023, 10023ВА, 10023/У.

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Для заметок