



Вспомогательная ступенька  
10222

Вспомогательная ступенька с ручкой  
10222Н



Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА _____	3
1.1 Назначение _____	3
1.2 Технические характеристики _____	3
1.3 Упаковка _____	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ _____	4
2.1 Важные предупреждения _____	4
2.2 Порядок работы _____	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ _____	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик вспомогательной ступеньки 10222 и вспомогательной ступеньки с ручкой 10222Н.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Данные изделия предназначены для использования в качестве вспомогательной ступеньки. Вспомогательная ручка служит для поддержания равновесия.

### 1.2 Технические характеристики

Характеристики	10222	10222Н
материал	сталь, резина	сталь, резина
высота (см)	24	86
ширина (см)	35	35
глубина (см)	42	45
вес изделия (кг)	2,4	3,7

### 1.3 Упаковка

Комплектация 10222:

- Двухсторонняя Ножка - 2 шт.
- Поверхность ступеньки - 1 шт.
- Винт барашковый - 5 шт.

Комплектация 10222Н:

- Двухсторонняя Ножка - 2 шт.
- Поверхность ступеньки - 1 шт.
- Винт барашковый - 5 шт.
- Винт барашковый большой - 4 шт.
- Ручка для ступеньки - 1 шт.
- Трубка для соединения ручки с поверхностью ступеньки - 2 шт.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин.
- Ни в коем случае не облакачивайтесь всем весом на ручку.
- Это может привести к опрокидыванию и серьезным повреждениям.
- Максимальная нагрузка: 120 кг.

### 2.2 Порядок работы

Прежде чем приступить к использованию необходимо произвести сборку:

#### **Для 10222**

- Переверните и положите поверхность вспомогательной ступеньки на ровную и чистую поверхность.
- После чего совместите две двухсторонние ножки над данной ступенькой, так чтобы совпали центральные части и отверстия на поверхности ступеньки и ножках.
- Вкрутите винт барашковый в отверстия на ножках.

#### **Для 10222H**

- Переверните и положите поверхность вспомогательной ступеньки на ровную и чистую поверхность.
- После чего совместите две двухсторонние ножки над данной ступенькой (проследите, чтобы отверстия на ножках для вкручивания ручки были с одной стороны), так чтобы совпали центральные части и совпали отверстия на поверхности ступеньки и ножках.
- Вкрутите винт барашковый в отверстия на ножках.
- Поставьте ступеньку на ножки.
- После чего поочередно совместите трубку для соединения со ступенькой, так чтобы отверстия на трубке совпали с отверстиями на ножке, далее вкрутите винт барашковый большего размера, чтобы трубка была не подвижна.
- Повторите действия из предыдущего пункта со второй трубкой.
- На трубки наденьте ручку до момента появления кнопки.

### 3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

### 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Вспомогательная ступенька 10222

Вспомогательная ступенька с ручкой 10222Н

Производитель: «Валентайн Интернейшнл Лтд», Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\* Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Информационное письмо

Исх. № 121/11-2013 от 15.11.2013 г.

Для заметок