

# AMRUS



Победитель международной фармацевтической  
премии «Зеленый крест»  
в категории «Бренд года» в номинации  
«Медицинская техника и средства реабилитации»

**Изделия ортопедические для профилактики и  
реабилитации инвалидов -**

**Кресла-туалеты серии АМСВ с принадлежностями:  
кресло-туалет модели АМСВ6809**



Руководство по эксплуатации

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке.

Отрегулируйте телескопические опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета.

Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на телескопических опорах закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

Для использования кресла совместно с унитазом замените приемник - резервуар тубусом (направителем).

## ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

- Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.
- Поднимитесь, опираясь на поручни коляски.
- Перенесите руку на поручень кресла-туалета.
- Если у Вас поражена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне.
- Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений.

Не допускайте прикосновения кресла-туалета к электрическим проводам.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники телескопических опор.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

## ХРАНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте.

Не подвергайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли.

Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей.


Температура транспортирования и хранения от -20 до +60°C.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина x Глубина x Высота сиденья (от пола) мм	560x520x400-550
Максимальная допустимая нагрузка, кг	100
Масса кресла-туалета, не более, кг	6,5
Емкость приемника-резервуара, не менее, л	5,0
Температура эксплуатации, °С	от +10 до +40

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Рама                           | - 1 шт. |
| 2. Перекладина                    | - 1 шт. |
| 3. Опоры телескопические          | - 4 шт. |
| 4. Держатель приемника-резервуара | - 1 шт. |
| 5. Сиденье                        | - 1 шт. |
| 6. Крышка сиденья                 | - 1 шт. |
| 7. Приемник-резервуар             | - 1 шт. |
| 8. Тубус                          | - 1 шт. |
| 9. Крышка приемника-резервуара    | - 1 шт. |
| 10. Спинка                        | - 1 шт. |

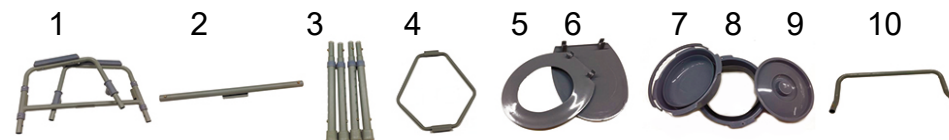

## ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Раскройте створки рамы.



2. Вставьте перекладину в пластиковые фиксаторы, расположенные на раме.




3. Прикрепите спинку к задней стороне рамы.



4. Вставьте телескопические опоры в собранную раму.



5. Вставьте держатель для приемника-резервуара в специальные крепления на перекладине и на задней части рамы.

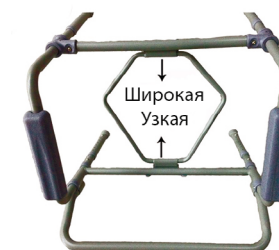

6. Прикрепите сиденье, затем крышку.



7. Вставьте приемник-резервуар в держатель, опустите сиденье и закройте крышку.



## ДАнные О РЕГИСТРАЦИИ

**Производитель** «Амрус Энтерпрайзис Лтд.» США  
Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,  
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

**Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий**  
ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
РФ, Москва, 115054, ул.Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1

**Место производства** Home Medical Products Inc., No. 1, Dama Rd., Waipu Dist.,  
Taichung City, 438, Taiwan (Китай)

**Регистрационное удостоверение**  
№ ФСЗ 2007/00749 от 26.11.2021

**Соответствие** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4)

**Срок службы** не менее 5 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к креслу-туалету срок его службы может быть значительно больше указанного. Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию кресла-туалета по истечении указанного срока службы обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Сохраняйте руководство по эксплуатации и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисный центр, указанный торгующей организацией.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего руководства по эксплуатации.
4. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
5. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
  - удара;
  - механического воздействия;
  - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
  - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

Кресло-туалет модели АМСВ6809 проверено в моем присутствии, получено в полностью укомплектованном виде, в исправном состоянии, в заводской упаковке, без внешних дефектов и механических повреждений. С условиями гарантии ознакомлен. Претензий не имею.



\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

\_\_\_\_\_  
Отметка о продаже

Адреса сервисных центров в регионах России указаны на сайте [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) в разделе "Сервисные центры".

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте прибор по адресу: Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5, ЗАО фирма "Москва-Амрос".

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) e-mail: [info@mos-amros.ru](mailto:info@mos-amros.ru)

или по телефону 8 800 250 01 06 (звонок бесплатный).

Отметки о ремонте: