



Костыли подмышечные

10021/P



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей подмышечных Barry 10021/P.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Костыли подмышечные Barry 10021/P предназначены для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

1.2 Технические характеристики

складная	+
материал	алюминий; подмышечный валик, валик для кисти и насадка резиновые
шаг регулировки высоты, см	2,5
рукоятка	мягкая, регулируется по высоте
валик	мягкий, регулируется по высоте
вес, кг	2
особенность	3 размера в 1
макс. нагрузка, кг	115
гарантия	6 мес.

1.3 Упаковка

В комплектации: одна пара костылей, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.


- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.

2.2 Порядок работы

1. Нажмите на медную кнопку.



2. Прокрутите нижнюю часть костыля так, чтобы медные кнопки не попали в пазы, и вытащите ножку костыля.

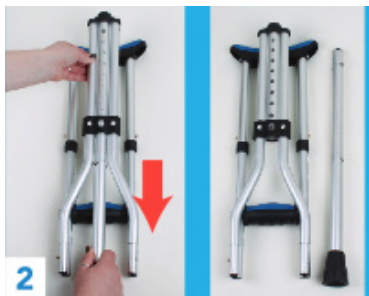

3. Раскрывайте основание костыля.



4. Нажмите на медную кнопку и опустите верхнюю часть костыля



5. Вставьте ножку костыля с насадкой.



6. С помощью кнопок настройте верхнюю и нижнюю части костыля.



Складная система костылей Barry 10021/P позволяет компактно размещать костыли в автомобиле, под столом, в ресторане, в самолете. Просто потяните две части костыля и сложите их. Универсальная система позволяет отрегулировать костыль под рост, как взрослого человека, так и подростка.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Костыли подмышечные Barry 10021/P
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;
www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Для заметок