



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне. При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты производства.
3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего руководства по эксплуатации.
4. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
5. Гарантия не распространяется на изделие, поврежденное вследствие:
 - удара, механического воздействия;
 - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
 - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

2021



Дата продажи

Адреса сервисных центров в регионах России указаны на сайте www.mos-amros.ru в разделе "Сервисные центры".

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу: Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.mos-amros.ru E-mail: info@mos-amros.ru телефон 8 800 250 01 06

С условиями действия гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Отметки о ремонте

НАЗНАЧЕНИЕ

Опоры-ходунки – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя.

Служат для увеличения устойчивости пользователя при ходьбе и уменьшения нагрузки на ноги за счет переноса ее на верхнюю часть туловища и руки. Предназначены для пользователей, имеющих повреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата, ослабленных или имеющих нарушения чувства равновесия, с массой тела до 100 кг.

Риски, связанные с применением опор-ходунков, не выявлены.

ОПИСАНИЕ

Опоры-ходунки (далее - ходунки) жесткие:

AMW1B72 с одним замком, с передними колесами диаметром 75 мм,
AMW1B73 с одним замком, с передними колесами диаметром 125 мм,
AMW2B75 с двумя замками, с передними колесами диаметром 75 мм,
AMW2B76 с двумя замками, с передними колесами диаметром 125 мм,

выполнены из легкосплавных материалов, регулируются по высоте. Рукоятки ходунков изготовлены из неадсорбирующего материала с низкой теплопроводностью, обеспечивают отсутствие скольжения при захвате пользователем, а также легкость чистки и санитарной обработки. Предусмотрена возможность замены резиновых наконечников опор.

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРОВ

- Отрегулируйте высоту ходунков перемещением нижних частей опор.

- Высота ходунков должна быть такой, чтобы рукоятки находились на уровне запястий стоящего человека. При опоре на рукоятки ходунков руки должны быть слегка согнуты в локте (на 20 - 30°).

- Правильное положение рук приводит к лучшей осанке и меньшей утомляемости.

- В начальный период пользования ходунками соблюдайте особую осторожность, чтобы уменьшить риск падения.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Убедитесь, что замок запирающего механизма ходунков закреплен и зафиксирован.

- Убедитесь, что кнопки пружинных фиксаторов, регулирующих длину нижних опор ходунков, закреплены и зафиксированы.

ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К ХОДУНКАМ

- Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.

- Поднитесь, опираясь на поручни коляски.

- Поочередно перенесите руки на рукоятки ходунков.

- Если у Вас поражена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОДУНКОВ

- Проконсультируйтесь с врачом для правильного выбора ходунков и принадлежностей к ним, а также дополнительных рекомендаций, основанных на Ваших возможностях и ежедневной активности.

- Поставьте ходунки перед собой.

- Убедитесь, что опоры ходунков и колеса опираются на пол (на землю).

- Двигайтесь вперед, приподнимая задние опоры и передвигая ходунки перед собой.

Руководство по эксплуатации

Дата выпуска 2006

Дата пересмотра 2020



AMW1B72 (с колесами 75 мм)



AMW1B73 (с колесами 125 мм)



AMW2B75 (с колесами 75 мм)



AMW2B76 (с колесами 125 мм)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Предохраняйте опоры ходунков от ударов о препятствия.
- Избегайте попадания опор ходунков в складки ковра или покрывала.
- Не допускайте прикосновения опор ходунков к электрическим проводам.
- При использовании ходунков поочередно приподнимайте задние опоры и передвигайте вперед передние опоры ходунков.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не пользуйтесь ходунками на лестницах или эскалаторах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	AMW1B72	AMW1B73	AMW2B75	AMW2B76
Высота минимальная, мм	825	825	825	825
Высота максимальная, мм	1000	1000	1000	1000
Шаг регулировки, мм	25	25	25	25
Ширина максимальная, мм	630	630	600	600
Длина максимальная, мм	515	540	510	540
Диаметр поворота, мм	760	760	760	760
Число замков	1	1	2	2
Диаметр колес, мм	75	125	75	125
Число колес	2	2	2	2

Температура эксплуатации: от -40 до +40°C; влажность до 100% (при 25°C)

Температура транспортирования и хранения: от -50 до +40°C; влажность до 98% (при 25°C)

Срок хранения: не менее 3 лет

Срок службы изделия: не менее 2 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к изделиям срок их службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию изделий по истечении указанного срока службы обратитесь в сервисный центр.

После окончания службы ходунки не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизацию производить в порядке, определенном местными органами власти для V класса отходов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Сохраняйте ходунки в чистом и сухом виде.

- Очистку поверхности рукояток производите теплой водой со слабым раствором моющего средства.

- Металлические детали очищайте влажной тканью.

- Не допускайте повреждения декоративных покрытий ходунков твердыми и острыми предметами.

- При необходимости проведите дезинфекцию ходунков 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, либо 1% раствором монохлорамина.

ДАНЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ

Производитель: "Амрус энтерпрайзис, Лтд.", США
Amrus Enterprises, Ltd. 720 King Georges Post Road,
Suite 305, Fords, New Jersey 08863, USA

Импортер/ Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ЗАО фирма "Москва-Амрос",
Россия, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1

Производитель/ Место производства

"Р. Пун Медикал Продактс (Мингуан) Ко., Лтд.", Китай
Qicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province,
People's Republic of China

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2016/4188 от 06.06.2016

ГОСТ 50444-92 (Разд. 3, 4)

Соответствие: ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010

