

AMRUS



Победитель международной фармацевтической
премии «Зеленый крест»
в категории «Бренд года» в номинации
«Медицинская техника и средства реабилитации»

**Изделия ортопедические для профилактики и
реабилитации инвалидов -**

**Кресла-туалеты серии АМСВ с принадлежностями:
кресло-туалет модели АМСВ6808**



Руководство по эксплуатации

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соберите кресло-туалет, как показано на рисунке на обложке.
Отрегулируйте выдвигающиеся опоры, чтобы получить желаемую высоту кресла-туалета.

Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно закреплены, а кнопки фиксаторов на нижних частях опор закреплены и зафиксированы (см. рисунок на обложке).

Для использования кресла совместно с унитазом замените приемник-резервуар тубусом (направителем).

ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ К КРЕСЛУ-ТУАЛЕТУ

Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.

Поднимитесь, опираясь на поручни коляски.

Перенесите руку на поручень кресла-туалета.

Если у Вас поражена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне.

Повернитесь и сядьте на сиденье кресла-туалета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохраняйте кресло-туалет от ударов и повреждений.

Не допускайте прикосновения кресла-туалета к электрическим проводам.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки кресла – туалета пользуйтесь водой и нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью.

Не применяйте растворители (спирт, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

ХРАНЕНИЕ

Храните кресло-туалет после использования в сухом и чистом месте.

Не подвергайте кресло-туалет воздействию высокой температуры, влажности и пыли.

Оберегайте кресло-туалет от воздействия прямых солнечных лучей.

Температура транспортирования и хранения от -20 до +60°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-----------------|
| Ширина x Глубина x Высота сиденья (от пола) мм | 545x475x400-500 |
| Емкость приемника-резервуара, л | 5 |
| Максимально допустимая масса пользователя, кг | 100 |
| Масса кресла-туалета, не более, кг | 4,33 |

ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ

Производитель «Амрус Энтерпрайзис Лтд.» США
Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий
ЗАО фирма «Москва-Амрос»,
РФ, Москва, 115054, ул.Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1

Место производства
Home Medical Products Inc., No. 1, Dama Rd., Waipu Dist.,
Taichung City, 438, Taiwan (Китай)

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2007/00749 от 26.11.2021

Соответствие ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4)

Срок службы не менее 5 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к креслу-туалету срок его службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию кресла-туалета по истечении указанного срока службы обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Сохраняйте руководство по эксплуатации и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока.

При возникновении неисправности обращайтесь в сервисный центр, указанный торгующей организацией.

Отметки о ремонте:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Срок действия гарантии – 12 месяцев с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии настоящего руководства по эксплуатации.
4. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку.
5. Гарантия не распространяется на кресло-туалет, поврежденное вследствие:
 - удара;
 - механического воздействия;
 - несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
 - пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

Кресло-туалет модели АМСВ6808 проверено в моем присутствии, получено в полностью укомплектованном виде, в исправном состоянии, в заводской упаковке, без внешних дефектов и механических повреждений. С условиями гарантии ознакомлен. Претензий не имею.



Подпись покупателя

Отметка о продаже

Адреса сервисных центров в регионах России указаны на сайте **www.mos-amros.ru** в разделе “Сервисные центры”.

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте прибор по адресу: Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5, ЗАО фирма “Москва-Амрос”.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

www.mos-amros.ru e-mail: info@mos-amros.ru

или по телефону 8 800 250 01 06 (звонок бесплатный).