



Средства для самообслуживания и ухода  
за инвалидами: насадки на унитаз:  
арт. 10527L, арт. 10528, арт. 10528А,  
арт. 10528А/Т, арт. 10529, арт. 10540,  
арт. 10545.



Руководство по эксплуатации

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	5
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Руководство по сборке.....	5
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик насадок на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10529; 10527L; 10545; 10540.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Насадки на унитаз являются медицинским устройством, которое увеличивая высоту санитарного устройства, облегчают пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадки увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивают ему комфорт. Насадки выполнены из белого прочного и легко моющегося полиэтилена. Они подходят на унитазы любой формы и не требуют специального инструмента.

### 1.2 Технические характеристики

Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: [sims2.ru](http://sims2.ru).

Модель (артикул)	Максимальная нагрузка, кг	Масса, кг	Увеличение высоты унитаза, см	Материал	Габариты, см (ШхГ)
10528А	115	2,7	12	гигиенический, ударопрочный пластик	53х41
<b>Особенность:</b> <i>Съемные ручки</i>					
10528	115	2	18	гигиенический, ударопрочный пластик	41х41

10528А/Т	115	1,8	12	гигиенический, ударопрочный пластик	39x42
<b>Особенность:</b> Съёмные алюминиевые поручни с мягкими валиками, увеличенное расстояние между поручнями					
10529	115	1,9	14	гигиенический, ударопрочный пластик	34x40
<b>Особенность:</b> Съёмные алюминиевые поручни с мягкими валиками, увеличенное расстояние между поручнями					
10527L	115	1,1	12	гигиенический, ударопрочный пластик	35x39
<b>Особенность:</b> Крышка					
10545	115	1,3	16-21	гигиенический, ударопрочный пластик	38x40
<b>Особенность:</b> Защита от брызг, возможность регулировки по высоте					
10540	100	4,0	-	анодированный алюминий	Высота: 61-79 см ШхГ: 46-54x43 см
<b>Особенность:</b> Регулируемое расстояние между поручнями, регулируемая высота поручней					

### 1.3 Упаковка

В комплектации: Насадка на унитаз, поручни (кроме моделей 10545, 10527L, 10528), винты (только с моделью 10528А/Т, 10529), крепежные элементы (только с моделью 10540).

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.

### 2.2 Руководство по сборке.

Модель 10540.

Внимание: измерьте параметры Вашего унитаза и отрегулируйте ножки по ширине так, чтобы они подходили к Вашему унитазу.

Для установки поручней снимите с унитаза сиденье с крышкой.

1) Деталь №1 зафиксируйте к корпусу унитаза крепежными элементами сиденья.



Деталь №1

2) Посредством кнопочного замка на ножках совместите поручни с отверстиями детали №1 до щелчка, два положения замка позволяют регулировать ширину поручней.

3) Посредством кнопочного замка на телескопических ножках отрегулируйте высоту поручней.

Модель 10528А/Т.

Прикрепите поручни к нижней части насадки на туалет с помощью винтов.

Модель 10529.

Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями насадки на туалет до щелчка.

Модель 10528А.

Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями насадки на туалет до щелчка.

### 3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте изделие на наличие трещин и поломов.

### 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru).

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати,  
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Насадки на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10529; 10527L; 10545; 10540.

Производитель: “Валентайн Интернейшнл Лтд” Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

Регистрационное удостоверение от 21 июня 2011 года № ФСЗ 2011/09869

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\* Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Для заметок