



Поручень

Barry 12313

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия поручня Barry 12313.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Складной поручень Barry 12313 с поддерживающим основанием обеспечивает комфортное использование ванной комнаты и туалета.

1.2 Технические характеристики

Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: sims2.ru.

- Материал: сталь с порошковым напылением
- Вес: 2,5 кг

1.3 Упаковка

В комплектации: поручень, набор крепежей.

2. использование по назначению



2.1 Важные предупреждения:

- Перед использованием изделия, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
- Во избежание поломок изделия, будьте осторожны со всеми его деталями.

ВНИМАНИЕ! Не прибегайте к самостоятельному изменению или доработке конструкции изделия. Изменение конструкции изделия может привести к нарушению его функционала, поломке изделия, а также к причинению травм во время его использования.


2.2 Порядок работы

1. Перед использованием изделия обязательно закрепите его на ровной вертикальной поверхности при помощи шести болтов и дюбелей, входящих в комплект.
2. Убедитесь, что изделие хорошо закреплено.

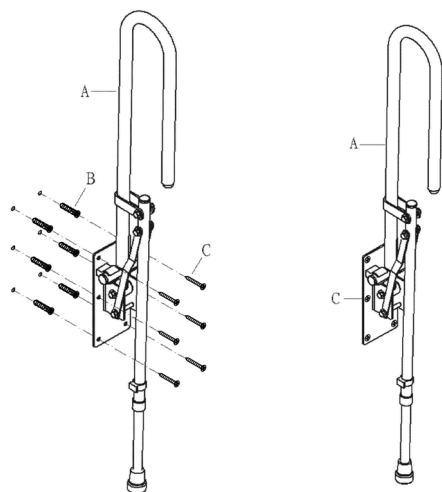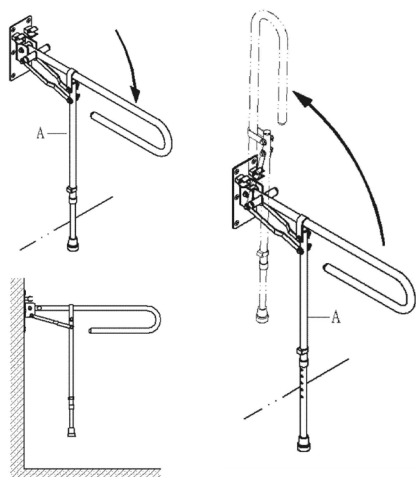

3. Для использования поручня опустите его. Чтобы сложить поручень, поднимите его вверх к стене.

4. Отрегулируйте высоту поручня, зафиксируйте его при помощи специальной клипсы, входящей в комплект.

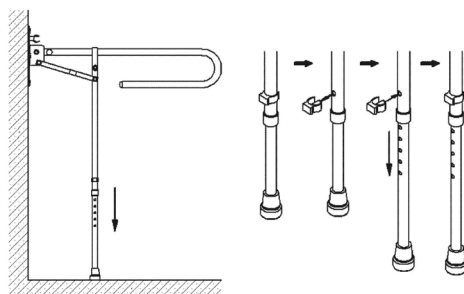

3. техническое обслуживание

Протирайте поручень мягким моющим средством, затем сухой тряпкой.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Поручень Barry 12313

Производитель: “Валентайн Интернейшнл Лтд” Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15
по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Для заметок