



### Трости опорные:

10080, 10090,10091, 10100S, 10100/2,  
10105, 10105B, 10121, 10124,  
10125,10127, 10129, 10134,  
10116, 10112, 10120

### Насадки для тростей

Резиновая насадка для тростей:

10019, 10034, 10035, 10036, 10037

Противогололедная насадка (звездочка):

10155

Противогололедная насадка (штырь):

10155/1

Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик телескопических тростей: 10080, 10090, 10091, 10100S, 10100/2, 10105, 10105B, 10121, 10124, 10125, 10127, 10129, 10134, 10116, 10112, 10120.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Трости телескопические являются медицинским устройством, предназначенным для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

### 1.2 Технические характеристики

Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: [sims2.ru](http://sims2.ru)

<b>Характеристика</b>	<b>Описание</b>	<b>Артикул</b>
материал	алюминий	все модели
рукоятка	мягкая резиновая	10100S, 10080, 10105, 10116, 10112, 10120
	двухуровневая	10100/2
	T-образная (деревянная)	10090, 10105(T), 10121
	эргономичная пластико- вая	10091, 10124, 10127, 10129
	анатомическая ручка	10125
особенность	смещенный центр тяжести	10100S, 10112
	выдвижное устройство против скольжения	10105, 10120
	для незрячих	10105B
	бесступенчатая регули- ровка высоты ручки	10129
	трость-стул	10134
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

### 1.3 Упаковка

Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка - 114 кг.

### 2.2 Порядок работы

1. Трости продаются в собранном виде.

2. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

(Для того, чтобы прикрепить противогололедные наконечники (10155, 10155/1) к тростям или костылям необходимо выкрутить болты, которые находятся по бокам наконечника, присоединить наконечник к трубке трости или костыля, установить пластину-фиксатор, затянуть болты.)

## 3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

## 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Трости телескопические 10080, 10090, 10091, 10100S, 10100/2, 10105, 10105B, 10121, 10124, 10125, 10127, 10129, 10134, 10116, 10112, 10120.

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Номер артикула	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

Регистрационное удостоверение Минздрава № ФСЗ 2011/09868 от 21.06.2011

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\*Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Дата редакции: 22.01.2021

Для заметок

