

## Табурет для ванны

Настоящее руководство по эксплуатации и табурет для ванны (далее табурет или изделие), предназначено для ознакомления с работой, и содержит сведения по использованию, регламенту работы и технические характеристики.

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте ее во время использования изделия.

Сохраните ее для получения необходимой информации в будущем.

Не используйте табурет не ознакомившись с Инструкцией. Не используйте табурет, если на нем видны видимые повреждения.

Не пытайтесь внести изменения в конструкцию изделия.

ТМ «Аортис» гарантирует использование высококачественных материалов и контроль производства на всех его стадиях.

Табурет рекомендован для применения в медицинских учреждениях и дома.

Используется для повышения уровня комфорта во время проведения гигиенических процедур.

Табурет разработан для максимального удобства и безопасности пользователя. Предназначен для использования в жилых помещениях.

### 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования табуреты убедитесь, что она находится в надлежащем состоянии и готова к эксплуатации. Регулярно проверяйте общее техническое состояние.

1. УСТАНОВЛИВАЙТЕ табурет на ровную горизонтальную поверхность.

2. ПРОВЕРЯЙТЕ надлежащее качество табурета перед каждым использованием.

3. Если обнаружена неисправность, то НЕ проводите ремонт самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу для получения инструкций.

4. НЕ наклоняйте табурет.

5. В случае использования изделия разными пациентами РЕКОМЕНДУЕТСЯ тщательно мыть и дезинфицировать табурет, чтобы избежать инфекций.

6. Пользователям с ограниченными физическими возможностями РЕКОМЕНДУЕТСЯ обращаться за помощью к ассистенту.

ТМ «Аортис» не гарантирует безопасность пользователя и правильное функционирование табурета при условии, если любой из оригинальных компонентов был изменен или заменен на неоригинальный.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Материал	Пластик
Размер изделия (ДхШхВ), см	51х39х36-51
Размеры сиденья (ДхШхВ), см	51х31х36-51
Максимальная нагрузка, кг	130
Вес, кг	1,8

### 4. ОПИСАНИЕ

Изделие оснащено резиновыми наконечниками против скольжения,

Ножки выполнены из металла и имеют полимерное покрытие. Сиденье изделия вогнутой формы со специальными отверстиями для стекания воды, изготовлено из особо прочного, легкомоющегося пластика, нейтрального к воздействию воды.

Дополнительно по бокам сиденья предусмотрены отверстия для установки душевой лейки и других аксессуаров.

### 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Проверяйте надлежащее качество табурета перед каждым использованием. Если изделие используется не регулярно, то осматривайте его минимум раз в год. В случае поломки или неисправности, повреждений одного или нескольких деталей, не используйте изделие.

Поверхность табурета обрабатывайте дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

Всегда держите табурет в чистоте для использования в течение длительного срока.

Очищайте с помощью воды и моющих средств. Не используйте растворители и абразивные средства.

Протирайте табурет сухой тряпкой после каждого использования.

### 6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ТМ «АОРТИС» гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу изделия в течение гарантийного средства 6 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции.

1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции;

- при наличии признаков постороннего вмешательства

(попытка самостоятельного ремонта изделия);

- если изделие использовалось не по назначению.

3. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения или повреждения

вследствие транспортировки;

- повреждения, вызванные попаданием к изделию

посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п..


4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) дней, не считая дня покупки в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Обмен товара надлежащего качества производится при условии, если он не использовался и, если сохранен его товарный вид (упакован в заводскую упаковку), потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

**ВНИМАНИЕ!** Артикул, технические характеристики, цвет, внешний вид, комплектация изделий могут быть изменены производителем без предупреждения.

## 7. ПОРЯДОК СБОРКИ

Положите сиденье стороной с отверстиями с резьбой вверх, прикрепите к сиденью раму с помощью крепежного комплекта. Прикрепите ножки с резиновыми наконечниками к раме с сиденьем. Изделие готово к эксплуатации.

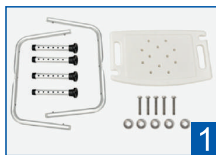

## 7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сиденье
2. Удлинительный опор (4 шт.)
3. Опоры сиденья (2 шт.)
4. Крепежный комплект
5. Паспорт и Инструкция по эксплуатации

## 8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель: ZHONGSHAN NEWBEST IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED

Место нахождения: CHINA, No.8, YONGXING NORTH ROAD YONGXING INDUSTRIAL AREA HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG

Импортер: ООО "АОРТИС"

107497, Россия, Москва, ш. Щёлковское, д. 79, к.1, кв. 444

