

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

покрытия защитного пастообразного –

пасты АБУЦЕЛ®

ТУ 32.50.50-009-83228278-2018

(Пер. уд. № РЗН 2014/1388 от 17.07.2019)

Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы АБУЦЕЛ® (далее Паста АБУЦЕЛ®) предназначено для заполнения неровностей кожи вокруг стомы, создания защитного барьера и продления срока использования кало- и урприемников.

Паста АБУЦЕЛ® защищает кожу и рубцующуюся ткань вокруг стомы.

Внимание! Пасту можно использовать **только** для наружного применения и только в сочетании с кало- и урприемниками.

Преимущества пасты АБУЦЕЛ®

Паста АБУЦЕЛ® обеспечивает дополнительную защиту и питание воспаленной кожи вокруг стомы благодаря наличию в ее составе альгината натрия, натрийкарбоксиметилцеллюлозы и касторового масла.

Как пользоваться пастой АБУЦЕЛ®

Обработайте кожу вокруг стомы теплым мыльным раствором или рекомендованным антисептическим средством и высушите полотенцем.

Важно! Накладывайте пасту АБУЦЕЛ® на чистую сухую кожу.

Отвинтите крышку тюбика и проколите защитную мембрану. Выдавите пасту АБУЦЕЛ® из тюбика на кожу вокруг стомы. Наносить следует только такое количество пасты, которое необходимо для сглаживания неровностей кожи.

Пасту распределите пальцем до получения ровной поверхности. Выдержите 20-30 секунд. Наклейте кало- или урприёмник.

Внимание! Паста АБУЦЕЛ® содержит спирт, поэтому при нанесении может вызывать чувство жжения.

Пасту можно наносить также непосредственно на липкое кольцо однокомпонентных или двухкомпонентных кало- или урприемников.

Если на коже имеются глубокие складки или рубцы, можно заполнять их слоями, подсушивая пасту в течение 20-30 секунд перед нанесением следующего слоя.

Внимание! Сразу после выдавливания пасты быстро и надежно закройте тюбик, чтобы избежать высыхания содержимого.

Удаление пасты АБУЦЕЛ®

После смены кало- или урприемника вымойте кожу вокруг стомы теплой мыльной водой. Не волнуйтесь, если после этого на коже останется некоторое количество пасты. Новый слой пасты можно накладывать на неудаленные остатки.

Условия хранения пасты АБУЦЕЛ®

Храните тщательно закрытый тюбик **при температуре от +5°C до +40°C** в недоступном для детей месте.

Использованный тюбик утилизируется вместе с бытовыми отходами, как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Сведения о производителе

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 12, корпус 1, этаж 3, помещение II, комната 15.
Тел.: +7(495)921-37-19, www.palma-med.ru