

МАНЖЕТА для приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых серии UA к медицинскому изделию «Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями

A&D
Эй энд Ди, Япония

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!


Японская компания A&D Company, Ltd. (Эй энд Ди Компани, Лимитед) благодарит Вас за покупку манжеты для медицинских изделий «Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями, обеспечивающей безболезненное измерение артериального давления.

Область применения

Манжета предназначена для использования с приборами для измерения артериального давления и частоты пульса цифровыми серии UA. Не является медицинским изделием.

Комплектация

1. Манжета (малого, стандартного, большого размеров).
2. Соединительная трубка.
3. Коннекторы для соединения с прибором для измерения артериального давления и частоты пульса автоматическим серии UA.
4. Руководство по эксплуатации.
5. Гарантийная карта.

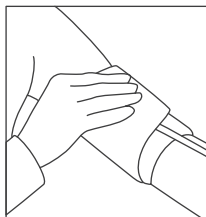

Выбор правильного размера манжеты


Использование манжеты, не соответствующей размеру руки пользователя, искажает результат измерения артериального давления. Если манжета мала, результат измерения может быть завышен, если велика – может быть занижен. Измерьте окружность Вашей руки и выберите соответствующий тип манжеты.

Малая	18-22 см	S*
Стандартная	22-32 см	M
Стандартная	23-37 см	SL
Большая	32-45 см	L
Стандартная каркасная	17-32 см	ES
Большая каркасная	22-43 см	EL

* Условные обозначения манжет представлены в качестве информации и не являются обязательными.

Правила эксплуатации

1. Вставьте коннектор соединительной трубки в разъем, установленный на боковой панели прибора.
2. Наложите манжету на плечо на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба. Не закатывайте рукава одежды, так как это может помешать току крови в сосудах, и не выполняйте измерения в одежде из плотной ткани.
3. Плотно закрепите манжету. Накачка плохо закрепленной или незакрепленной манжеты может привести к ее разрыву.
4. Убедитесь в том, что трубка нагнетания воздуха в манжету находится над локтевой ямкой.
5. Выполните измерение артериального давления как описано в руководстве по эксплуатации Вашего прибора.

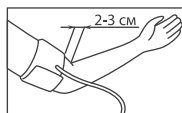

Хранение и уход

- Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок.
 - Оберегайте манжету и соединительную трубку от острых предметов.
 - Очистку манжеты необходимо проводить мягким ватным тампоном (или мягкой тряпочкой) с использованием слабого мыльного раствора. Не используйте влажную ткань и т.п. для протирания разъема подключения манжеты (он должен оставаться сухим). Никогда не используйте спирт, бензин, растворитель или другие агрессивные химикаты для чистки манжеты. Дезинфекцию манжеты необходимо проводить мягким ватным тампоном (или мягкой тряпочкой) с использованием 3% раствора перекиси водорода или с использованием 3% раствора перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора нейтрального моющего средства.
- Стерилизация манжеты не предусмотрена.

Условия эксплуатации	
Температура	от +10 °С до + 40 °С
Влажность	не более 85%
Атмосферное давление	от 70 до 106 kPa
Условия хранения	
Температура	от -20 °С до + 60 °С
Влажность	не более 95%
Атмосферное давление	от 70 до 106 kPa
Условия транспортирования	
Температура	от -20 °С до + 60 °С
Влажность	от 10% до 95%
Атмосферное давление	от 70 до 106 kPa

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации манжеты – 1 год.

Срок службы манжеты – 2 года.

В случае обнаружения производственного дефекта покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена манжеты в течение всего гарантийного срока в Сервисном центре ООО «Эй энд Ди РУС». Полный список адресов сервисных центров уточняйте на сайте: <http://www.and-rus.ru/service/address>.

Гарантийные обязательства действительны только при соблюдении правил эксплуатации.

По окончании срока службы подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09642 от 08.09.2022 г. на медицинское изделие «Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями».

Номер лота продукции соответствует дате производства и указан на упаковке.

Производитель:

A&D Company, Ltd, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan/ Эй энд Ди Компани, Лимитед, Япония, 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013 Япония

Место производства:

1. A&D Company, Limited, 1-243, Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan / Эй энд Ди Компани Лимитед, 1-243, Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония

2. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, P.R. China / Эй энд Ди Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., 1-5/Ф, Билдинг №4, Хенгчангронг Хай Тек Индастри Парк, Шаннан Ист Род, Хонгтиан, Шажинг, Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Китай

3. A&D Vietnam Limited, No. 28, Street 5, VSIP Bac Ninh Integrated Township and Industrial Park, Phu Chan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province, Vietnam / Эй энд Ди Вьетнам Лимитед, Но. 28, Стрит 5, ВСИП Бак Нинх Интегрэйтед Тауншип энд Индастриал Парк, Пху Чан Вард, Ту Сон Сити, Бак Нинх провинс, Вьетнам

Импортер:

ООО «Эй энд Ди РУС», РФ, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6, комн. 8Б.

Бесплатный телефон горячей линии: **8 800 200-03-80**

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru