

# Бандаж на брюшную стенку W-421 медицинский

Бандаж на брюшную стенку, арт. W-421, предотвращает осложнения в послеоперационном периоде, способствует формированию и заживлению послеоперационного рубца, в том числе и глубокого (мышечного).

- ▶ Улучшает тонус мышц передней брюшной стенки
- ▶ Обеспечивает поддерживающий эффект
- ▶ Позволяет осуществить раннюю мобилизацию (активизацию) после операции
- ▶ Предохраняет переднюю брюшную стенку от перерастяжения

Специальный материал, эластичный в продольном направлении и жесткий в поперечном, обеспечивает компрессионный и поддерживающий эффект.

Гибкое ребро жесткости препятствует скручиванию бандажа при движении. Специальная технология плетения нитей позволяет обеспечить воздухопроницаемость и гигроскопичность бандажа, что отвечает основным требованиям, предъявляемым к перевязочному материалу.

Высота спинки бандажа составляет 23,5 см.

Мягкий клапан защищает рану от случайных воздействий.

## Правила ухода:

Перед стиркой рекомендуется застегнуть все застёжки

-  Стирать вручную
-  Температура не выше 30°C
-  Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
-  Химчистка запрещена
-  Нельзя отбеливать, использовать химически активные добавки
-  Не гладить. Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

## Расшифровка символов с упаковки:

-  Обратитесь к инструкции по эксплуатации
-  Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
-  Производитель
-  Модель
-  Беречь от влаги
-  Беречь от солнечных лучей

 -40°C  
ПРИМЕНЕНИЕ  
Температура применения от -40 °C до +40 °C

 -20°C  
ХРАНЕНИЕ  
Хранить при температуре от -20 °C до +50 °C

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ. Номер и дату РУ смотрите на стикере на упаковке.

## Размер бандажа подбирается по окружности талии

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для бандажей на основании статистических данных:

Размер бандажа	Размер	Окружность талии
S	42-44	62-72 см
M	46-48	72-82 см
L	48-50	82-92 см
XL	50-52	92-102 см
XXL	52-54	102-112 см



## Порядок надевания:

Бандаж рекомендуется надевать лежа. Степень компрессии регулируется при помощи застёжек-липучек «Велкро».

## Режим ношения:

Профилактический в течение дня, если иное не предписано врачом.

При подборе рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

## Показания:

- ▶ восстановление после операций на брюшной полости и органах малого таза
- ▶ профилактика образования грыж
- ▶ профилактика ущемления вправимых грыж
- ▶ профилактика расхождения швов
- ▶ опущение органов брюшной полости
- ▶ реабилитация после пластических операций на передней брюшной стенке
- ▶ восстановление после кесарева сечения
- ▶ восстановление тонуса мышц и кожи после обычных родов

## Комплектность: бандаж

**Состав:** 65,5% полиэстер, 24% нейлон, 10,5% спандекс, металлическая пружинная вставка

**Гарантийный срок:** 6 месяцев на медицинские свойства

**Срок годности/службы** не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации

Дата производства изделия указана на этикетке в номере партии «LOT»: первые две цифры – неделя производства, следующие четыре цифры – год производства

## Противопоказания:

- ▶ беременность
- ▶ диафрагмальные грыжи
- ▶ невправимые грыжи брюшной стенки
- ▶ синдром портальной гипертензии
- ▶ воспаление швов
- ▶ заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся спастическими болями и вздутием живота

**Предупреждения:** при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, содержащиеся в составе бандажа, необходима предварительная консультация врача.

**Внимание!** Слишком плотное прилегание бандажа может привести к локальному сдавливанию кожи и пережатию кровеносных сосудов и нервов. Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов или новых жалоб необходимо прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.